




**CORRADOMED**  
Sp. z o. o.  
25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5  
tel. 41 346-47-73  
fax 41 346-42-40  
*biuro@corradomed.pl*

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI COR-3 (z dwoma podłokietnikami)**

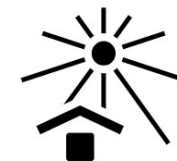

wersja 1.0 wydana 07.2024



## I. DANE TECHNICZNE

Całkowita wysokość	900 mm
Całkowita szerokość	800 mm
Szerokość podstawy	700 mm
Całkowita głębokość	800 mm
Głębokość podstawy	700 mm
Waga	18 kg
Dopuszczalne obciążenie	120 kg

## II ZASTOSOWANIE

Stanowisko do pobierania krwi jest prostym i praktycznym rozwiązaniem ułatwiającym sprawne przeprowadzanie zabiegu iniekcji, zarówno na prawym jak i lewym przedramieniu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu praktycznego rozwiązania polegającego na możliwości zmiany położenia podłokietnika o kąt 180 stopni, zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90 stopni jak również możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta.

Stanowiska stanowią doskonale wyposażenie gabinetów lekarskich.

## III. OBSŁUGA

*Zmianę położenia stanowiska z prawego na lewe lub odwrotnie dokonujemy poprzez:* poluzowanie pokręćla umieszczonego pod podłokietnikiem i przekręcenie podłokietnika o 180° przy jednoczesnej zmianie położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90°.

Po ustawieniu podłokietnika w odpowiedniej wysokości należy dokręcić pokręćlo.

## IV. DEZYNFEKCJA

Stanowisko do pobierania krwi jest wyrobem wielokrotnego użytku.

W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu przetrzeć gazą nasączoną środkiem dezynfekcyjnym (Virkon, Incodyna) lub

spryskać aerosolem odkażającym np. Desprey zachowując czas ekspozycji zależnie od aktualnych wymogów epidemiologicznych. W każdym przypadku po użyciu środka dezynfekcyjnego zaleca się umycie powierzchni tapicerowanej preparatem z dodatkiem detergentu i wytarcie do sucha.

W przypadku metalowych konstrukcji nie zaleca się środków dezynfekcyjnych zawierających chlor z uwagi na wystąpienie ryzyka korozji.

## V. UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Stanowisko przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
2. W czasie zabiegu na stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
3. Nie dopuszcza się przenoszenia stanowiska wraz z pacjentem.
4. Zabrania się gwałtownego siadania na stanowisku (wskakiwania).
5. Stanowisko powinno być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła.
6. Stanowiska nie należy narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie tapicerki.
7. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
8. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie stanowią podstawy do reklamacji.

## VI. ZALECENIA

1. Użytkować stanowisko zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwacłonkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.