

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU  
KRZESEŁKA PRYSZNICOWEGO UCHYLNIEGO KPU, KPU NOGA, KPU-2, KPU-2  
NOGA, KPU-2 PU, KPU-2 PVC, KPU-O**

**PRZEZNACZENIE**

Krzeselko prysznicowe uchylne przeznaczony jest do użytkowania w szpitalach, mieszkaniach, itp. Zastosowanie krzeselka przy prysznicach ułatwia osobie niepełnosprawnej korzystanie z urządzeń sanitarnych jak również ułatwia utrzymanie higieny oraz codziennej toalety i w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych korzystających z tych węzłów sanitarnych.

**MOCOWANIE DO PODŁOŻA**

Krzeselko należy zamocować do podłoża w pozycji poziomej. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów stalowych po uprzednim nawierceniu w podłożu otworów o średnicy odpowiadającej plastikowej części kołka rozporowego i głębokości przekraczającej długość tego kołka w rozstawie odpowiadającym otworom w konstrukcji mocującej.

W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków.

Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie otwory przewidziane przez producenta w krzeselku prysznicowym.

Dołączone do krzeselka wkręty można zastosować do podłoża wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do podłoża wykonanego z siporexu, cegły dziurawki należy stosować wkręty o zwiększonej długości (minimum 80 mm). Nie zaleca się stosowania krzeselka na podłoża wykonane z gips-kartonu lub drewniane o grubości mniejszej niż 50 mm.

Po zamocowaniu krzeselka do podłoża zabezpieczyć łby wkrętów osłonami dołączonymi do kołków i wkrętów.

Po zamontowaniu krzeselka należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłoża posiada odpowiednią wytrzymałość.

**Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg  
(dla krzeselka z nogą – 150 kg)**

**DEZYNFEKCJA**

Krzeselko jest produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

**OSTRZEŻENIE:**

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA DO, KTÓREGO MOCUJESZ**

**KRZESEŁKO.**

**KRZESEŁKO NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRĘTY.**

**Corradomed Sp. z o.o.**

25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5, NIP: 959-14-82-951  
tel. 41 346-47-73, [biuro@corrado\*\*med\*\*.pl](mailto:biuro@corrado<b>med</b>.pl)

Wydana 06.2024 r.

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:

• „Producent” oznacza firmę CORRADOMED Sp. z o.o.z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Dobromyśl 5.

• „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.

2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:

• dla wyrobów ze stali węglowej, malowanych proszkowo- 1 rok,

• dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej- 10 lat

3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające

z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewoźową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.

5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:

• uszkodzenia mechaniczne,

• wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),

• przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,

• uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,

• uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów,

• ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez CORRADOMED Sp. z o.o..

6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

• przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjne z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,

• przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,

• zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,

• odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w

oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem.

Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.

Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.

8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:

• naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni

• po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.

9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.

10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisana datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU KRZESEŁKA PRYSZNICOWEGO UCHYLNIEGO KPU, KPU NOGA, KPU-2, KPU-2 NOGA, KPU-2 PU, KPU-2 PVC, KPU-O

### PRZEZNACZENIE

Krzeselko prysznicowe uchylne przeznaczony jest do użytkowania w szpitalach, mieszkaniach, itp. Zastosowanie krzeselka przy prysznicach ułatwia osobie niepełnosprawnej korzystanie z urządzeń sanitarnych jak również ułatwia utrzymanie higieny oraz codziennej toalety i w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych korzystających z tych węzłów sanitarnych.

### MOCOWANIE DO PODŁOŻA

Krzeselko należy zamocować do podłoża w pozycji poziomej. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów stalowych po uprzednim nawierceniu w podłożu otworów o średnicy odpowiadającej plastikowej części kołka rozporowego i głębokości przekraczającej długość tego kołka w rozstawie odpowiadającym otworom w konstrukcji mocującej.

W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków.

Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie otwory przewidziane przez producenta w krzeselku prysznicowym.

Dołączone do krzeselka wkręty można zastosować do podłoża wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do podłoża wykonanego z siporexu, cegły dziurawki należy stosować wkręty o zwiększonej długości (minimum 80 mm). Nie zaleca się stosowania krzeselka na podłoża wykonane z gips-kartonu lub drewniane o grubości mniejszej niż 50 mm.

Po zamocowaniu krzeselka do podłoża zabezpieczyć łby wkrętów osłonami dołączonymi do kołków i wkrętów.

Po zamontowaniu krzeselka należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłoża posiada odpowiednią wytrzymałość.

**Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg (dla krzeselka z nogą – 150 kg)**

### DEZYNFEKCJA

Krzeselko jest produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

### OSTRZEŻENIE:

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA DO, KTÓREGO MOCUJESZ**

**KRZESEŁKO.**

**KRZESEŁKO NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRĘTY.**

**Corradomed Sp. z o.o.**

25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5, NIP: 959-14-82-951  
tel. 41 346-47-73, [biuro@corradomed.pl](mailto:biuro@corradomed.pl)

Wydana 06.2024 r.

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:

• „Producent” oznacza firmę CORRADOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Dobromyśl 5.

• „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.

2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:

• dla wyrobów ze stali węglowej, malowanych proszkowo- 1 rok,

• dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej- 10 lat

3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające

z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewozową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.

5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:

• uszkodzenia mechaniczne,

• wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),

• przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,

• uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,

• uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów,

• ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez CORRADOMED Sp. z o.o..

6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

• przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,

• przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,

• zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,

• odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem.

Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.

Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.

8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:

• naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni

• po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.

9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.

10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisana datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią

firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.