

## 1. PRZEZNACZENIE

Uchwyt uchylny do WC przeznaczony jest do podtrzymania się osoby siadającej i wstającej z sedesu ułatwiając i zwiększając bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej korzystającej z urządzeń sanitarnych. Podniesienie uchwytu w czasie, gdy nie jest wykorzystywany ułatwia wykorzystanie urządzeń osobom sprawnym fizycznie. Uchwyt powinien być montowany we wszystkich rodzajach toaletach, które mogą być wykorzystane przez osoby niepełnosprawne: toalety publiczne, szpitale, przychodnie, domy opieki oraz w lokalach zajmowanych przez osoby niepełnosprawne.

## 2. PARAMETRY TECHNICZNE

Uchwyt wykonany jest z rury stalowej o średnicy  $\varnothing 25$  mm lub  $\varnothing 32$  mm pokrytej farbami proszkowymi o wysokiej odporności lub ze stali nierdzewnej. Uchylne ramię posiada długość 500-800 mm oraz podstawę o wymiarach 100x150 mm mocowaną do ściany za pomocą 4-ech stalowych wkrętów  $\varnothing 6$  mm. Do uchwytu dołączono standardowy komplet wkrętów stalowych o długości 60 mm wraz z plastikowymi kołkami rozporowymi o średnicy 10 mm i długości 60 mm. Uchwyt mocowany jest na wysokości 600 - 800 mm od podłogi w zależności od potrzeb użytkowników.

**Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg.**

## 3. INSTALACJA UCHWYTU

Uchwyt uchylny mocować należy do ściany pionowej o odpowiedniej wytrzymałości z pełnej cegły, betonu po uprzednim nawierceniu w podłożu 4-ech otworów o rozstawie odpowiadającym rozstawowi otworów na płycie stalowej stanowiącej podstawę uchwytu, wiertłem 10 mm i głębokości minimum 60 mm.

W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków rozporowych.

Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie otwory przewidziane przez producenta w uchwycie uchylnym.

Dołączone do uchwytu uchylnego wkręty można zastosować do podłoża wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do podłoża wykonanego z siporexu, cegły dziurawki należy stosować wkręty o zwiększonej długości (minimum 80 mm).

Nie zaleca się stosowania uchwytu uchylnego na podłoża wykonane z gips-kartonu lub drewniane o grubości mniejszej niż 60 mm. Po zamocowaniu uchwytu uchylnego do podłoża zabezpieczyć łąby wkrętów plastikowymi osłonami dołączonymi do kołków i wkrętów.

Po zamontowaniu uchwytu uchylnego należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłoża posiada odpowiednią wytrzymałość.

## 4. UŻYTKOWANIE

W trakcie użytkowania należy systematycznie sprawdzać czy kołki mocujące uchwyt nie zostały obłuzowane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek luzów należy sprawdzić ich przyczynę i dokręcić śruby lub je wymienić.

W przypadku samoczynnego opadania ramienia uchwytu z pozycji pionowej należy dokręcić śrubę mocującą ramię do podstawy.

## 5. DEZYNFEKCJA

Uchwyty są produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon)

Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

## OSTRZEŻENIE:

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA, DO, KTÓREGO MOCUJESZ UCHWYT UCHYLNY.  
UCHWYT UCHYLNY NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRĘTY.**

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Corradomed Sp. z o. o.  
25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5, NIP: 959-14-82-951  
tel. 41 346-47-73, [biuro@corrado\*\*med\*\*.pl](mailto:biuro@corrado<b>med</b>.pl)

Wydana 07.2024 r.

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:

• „Producent” oznacza firmę CORRADOMED Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Dobromyśl 5.

• „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.

2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:

• dla wyrobów ze stali węglowej, malowanych proszkowo- 1 rok,

• dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej- 10 lat

3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewoźową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.

5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:

• uszkodzenia mechaniczne,

• wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),

• przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,

• uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,

• uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów,

• ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez CORRADOMED Sp. z o. o.

6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

• przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,

• przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,

• zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,

• odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.

Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.

8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:

• naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni

• po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.

9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.

10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.

## 1. PRZEZNACZENIE

Uchwyt uchylny do WC przeznaczony jest do podtrzymania się osoby siadającej i wstającej z sedesu ułatwiają i zwiększając bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej korzystającej z urządzeń sanitarnych. Podniesienie uchwytu w czasie, gdy nie jest wykorzystywany ułatwia wykorzystanie urządzeń osobom sprawnym fizycznie. Uchwyt powinien być montowany we wszystkich rodzajach toaletach, które mogą być wykorzystane przez osoby niepełnosprawne: toalety publiczne, szpitale, przychodnie, domy opieki oraz w lokalach zajmowanych przez osoby niepełnosprawne.

## 2. PARAMETRY TECHNICZNE

Uchwyt wykonany jest z rury stalowej o średnicy  $\varnothing 25$  mm lub  $\varnothing 32$  mm pokrytej farbami proszkowymi o wysokiej odporności lub ze stali nierdzewnej.

Uchylnie ramię posiada długość 500-800 mm oraz podstawę o wymiarach 100x150 mm mocowaną do ściany za pomocą 4-ech stalowych wkrętów  $\varnothing 6$  mm.

Do uchwytu dołączono standardowy komplet wkrętów stalowych o długości 60 mm wraz z plastikowymi kołkami rozporowymi o średnicy 10 mm i długości 60 mm. Uchwyt mocowany jest na wysokości 600 - 800 mm od podłogi w zależności od potrzeb użytkowników.

**Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg.**

## 3. INSTALACJA UCHWYTU

Uchwyt uchylny mocować należy do ściany pionowej o odpowiedniej wytrzymałości z pełnej cegły, betonu po uprzednim nawierceniu w podłożu 4-ech otworów o rozstawie odpowiadającym rozstawowi otworów na płycie stalowej stanowiącej podstawę uchwytu, wiertłem 10 mm i głębokości minimum 60 mm.

W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków rozporowych.

Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie otwory przewidziane przez producenta w uchwycie uchylnym.

Dołączone do uchwytu uchylnego wkręty można zastosować do podłoża wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do podłoża wykonanego z siporexu, cegły dziurawki należy stosować wkręty o zwiększonej długości (minimum 80 mm).

Nie zaleca się stosowania uchwytu uchylnego na podłoża wykonane z gips-kartonu lub drewniane o grubości mniejszej niż 60 mm. Po zamocowaniu uchwytu uchylnego do podłoża zabezpieczyć łby wkrętów plastikowymi osłonami dołączonymi do kołków i wkrętów.

Po zamontowaniu uchwytu uchylnego należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłoża posiada odpowiednią wytrzymałość.

## 4. UŻYTKOWANIE

W trakcie użytkowania należy systematycznie sprawdzać czy kołki mocujące uchwyt nie zostały obłuzowane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek luzów należy sprawdzić ich przyczynę i dokręcić śruby lub je wymienić.

W przypadku samoczynnego opadania ramienia uchwytu z pozycji pionowej należy dokręcić śrubę mocującą ramię do podstawy.

## 5. DEZYNFEKCJA

Uchwyt uchylny do wc jest produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon)

Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

## OSTRZEŻENIE:

**ZWRÓĆ UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA, DO, KTÓREGO MOCUJESZ UCHWYT UCHYLNY.  
UCHWYT UCHYLNY NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRĘTY.**

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Corradomed Sp. z o. o.  
25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5, NIP: 959-14-82-951  
tel. 41 346-47-73, [biuro@corradomed.pl](mailto:biuro@corradomed.pl)

Wydana 07.2024 r.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:

• „Producent” oznacza firmę CORRADOMED Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Dobromyśl 5.

• „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.

2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:

• dla wyrobów ze stali węglowej, malowanych proszkowo- 1 rok,

• dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej- 10 lat

3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewoźową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.

5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:

• uszkodzenia mechaniczne,

• wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),

• przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,

• uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,

• uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów,

• ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez CORRADOMED Sp. z o. o.

6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

• przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,

• przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,

• zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,

• odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.

Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.

8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:

• naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni

• po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.

9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.

10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.