



CORRADOMED
Sp. z o.o.

25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5

tel. 41 346-47-73

fax 41 346-42-40

biuro@corradomed.pl

STÓŁ REHABILITACYJNY DO MASAŻU SUCHEGO DLA NIEMOWLĄT



wersja 1.0 wydana 08.2024

I. DANE TECHNICZNE

Głębokość	680 mm
Szerokość	860 mm
Wysokość stelaża	800 mm
Wysokość całkowita	910 mm
Dopuszczalne obciążenie	120 kg

II ZASTOSOWANIE

Stół przeznaczony jest do przewijania niemowląt, ubierania, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych. Znajduje zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej tj. poczekalniach, gabinetach lekarskich, przychodniach.

Po ustawieniu stołu w miejscu przeznaczenia sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu. Do regulacji służy stopka, która umożliwia wypoziomowanie stołu.

III. BUDOWA

1. Blat pokryty pianką poliuretanową i tapicerką skaj
2. Stelaż
3. Stopka poziomująca

IV. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Elementy lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych.

Skaj. Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki.

Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

V. UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Przewijak przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
2. Nie dopuszcza się przenoszenia przewijaka wraz z dzieckiem.
3. Zaleca się stosowanie podkładów jednorazowych lub zdezynfekowanie stołu.
4. Przewijak powinien być użytkowany i przechowywany z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła.
5. Przewijaka nie należy narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie tapicerki.
6. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
7. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie stanowią podstawy do reklamacji.

VI. ZALECENIA

1. Użytkować przewijak zgodnie z instrukcją użytkowania.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwacłonkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.