

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLIKA ZABIEGOWEGO



1. PARAMETRY TECHNICZNE

Stolik zabiegowy wykonany z rurek stalowych, malowanych proszkowo na kolor biały.

Wyposażony w dwie szklane półki oraz dwie miski plastikowe.

Wysokość - 80 cm

Szerokość - 40 cm



Długość - 60 cm

2. MONTAŻ STOLIKA

Po rozpakowaniu stolika należy sprawdzić czy nie posiada on uszkodzeń. Następnie usunąć folię ze wszystkich elementów. Dłuższe pręty zamontować do ramek stolika (jak na zdjęciu).



Krótsze pręty zamontować do ramek stolika (jak na zdjęciu).

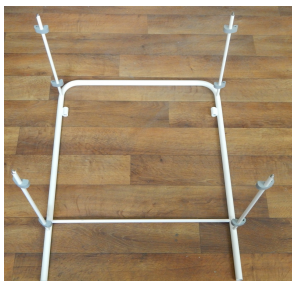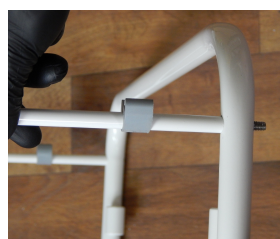

Połączyć drugą ramkę stolika z prętami.

Zamocować obręcze misek plastikowych w tuleje znajdujące się przy ramce stolika. Zamocować plastikowe miski w obręczach.



WARUNKI GWARANCJI

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:

• „Producent” oznacza firmę Corradomed Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Dobromyśl 5.

• „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.

2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:

• dla wyrobów ze stali węglowej, malowanych proszkowo- 1 rok,

• dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej- 10 lat

3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewoźową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.

5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:

• uszkodzenia mechaniczne,

• wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),

• przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,

• uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,

• uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów,

• ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez Corradomed Sp. z o.o..

6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

• przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,

• przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,

• zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,

• odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.

Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.

8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:

• naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni

• po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.

9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.

10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisana datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.