

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TABORETU PRYSZNICOWEGO – TP

1. PRZEZNACZENIE

Taboret prysznicowy przeznaczony jest do użytkowania w szpitalach, mieszkaniach itp.

Zastosowanie taboretu ułatwia osobom o obniżonej sprawności fizycznej samodzielne korzystanie z prysznica, w znacznym stopniu poprawia komfort kąpielni oraz zwiększa bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych korzystających z prysznica.

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Taboret wykonany jest z rury stalowej o średnicy 25 mm, pokrytej farbami proszkowymi o wysokiej odporności. Powierzchnia siedziska wykonana jest z tworzywa PVC.

Wymiary taboretu (szer.-dł.-wys): 360x340x420 [mm].

Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg.

3. UŻYTKOWANIE

Taboret jest praktyczny i funkcjonalny. Nóżki zakończone są gumowymi nasadkami antypoślizgowymi.

Korzystając z taboretu zaleca się, aby nie wykonywać przechyleń w tył, celem zabezpieczenia stabilności- równowagi.

4. DEZYNFEKCJA

Taboret prysznicowy jest produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon)

Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

Corradomed SP. z o.o.

25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5, NIP: 959-14-82-951

tel. 41 346-47-73, biuro@corradomed.pl

Data wydania 11.2024 r.

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:

- „Producent” oznacza firmę Corradomed Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Dobromyśl 5.

- „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.

2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:

- dla wyrobów ze stali węglowej, malowanych proszkowo- 1 rok,

- dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej- 10 lat

3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające

z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewozową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.

5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:

- uszkodzenia mechaniczne,

- wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),

- przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,

- uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,

- uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów,

- ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez Corradomed Sp. z o.o..

6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

- przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,

- przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,

- zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,

- odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku.

Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.

8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:

- naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni

- po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.

9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.

10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisana datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TABORETU PRYSZNICOWEGO – TP

1. PRZEZNACZENIE

Taboret prysznicowy przeznaczony jest do użytkowania w szpitalach, mieszkaniach itp.

Zastosowanie taboretu ułatwia osobom o obniżonej sprawności fizycznej samodzielne korzystanie z prysznica, w znacznym stopniu poprawia komfort kąpielni oraz zwiększa bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych korzystających z prysznica.

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Taboret wykonany jest z rury stalowej o średnicy 25 mm, pokrytej farbami proszkowymi o wysokiej odporności. Powierzchnia siedziska wykonana jest z tworzywa PVC.

Wymiary taboretu (szer.-dł.-wys): 360x340x420 [mm].

Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg.

3. UŻYTKOWANIE

Taboret jest praktyczny i funkcjonalny. Nóżki zakończone są gumowymi nasadkami antypoślizgowymi.

Korzystając z taboretu zaleca się, aby nie wykonywać przechyleń w tył, celem zabezpieczenia stabilności- równowagi.

4. DEZYNFEKCJA

Taboret prysznicowy jest produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon)

Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept.

Corradomed SP. z o.o.

25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5, NIP: 959-14-82-951

tel. 41 346-47-73, biuro@corradomed.pl

Data wydania 11.2024 r.

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
 - „Producent” oznacza firmę Corradomed Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Dobromyśl 5.
 - „Nabywca” oznacza finalnego nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.
2. Producent udziela następujących gwarancji licząc od dnia zakupu przez Nabywcę:
 - dla wyrobów ze stali węglowej, malowanych proszkowo- 1 rok,
 - dla wyrobów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej- 10 lat
3. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału. Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.
4. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonania usługi transportowej przez firmę przewoźną. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przy jego odbiorze.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.
5. W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez Producenta nie podlegają:
 - uszkodzenia mechaniczne,
 - wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną),
 - przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,
 - uszkodzenia powstałe w związku z nie zastosowaniem się Nabywcy do zaleceń eksploatacyjnych producenta,
 - uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów,
 - ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez Corradomed Sp. z o.o..
6. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:
 - przedstawienie oryginalnej karty gwarancyjnej z podpisem Sprzedawcy i oznaczeniem daty nabycia,
 - przedstawienie faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,
 - zgłoszenie wady w terminie 14 dni od jej wykrycia,
 - odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu.

Koszt dostawy sprzętu do punktu sprzedaży ponosi Nabywca. Sprzęt powinien być w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
7. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.

W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancyjny liczony jest od początku. Naprawy pogwarancyjne i wiążące się z tym usługi transportowe są odpłatne.
8. Nabywcy przysługuje, według jego wyboru, prawo żądania wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu zapłaconej ceny w wypadku, gdy:
 - naprawa nie zostanie wykonana w ciągu 14 dni
 - po dwukrotnej naprawie uszkodzenia uniemożliwiającego eksploatację, nadal wystąpią usuwane wcześniej wady.
9. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski.
10. Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
11. Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisana datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową jednostki handlowej, podpis sprzedającego oraz rodzaj sprzętu.