

VI. UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Taboret przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
2. Taboret powinien być użytkowany i przechowywany z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła.
3. Taboretu nie należy narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie tapicerki.
4. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
5. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie stanowią podstawy do reklamacji.

VII. ZALECENIA

1. Użytkować taboret zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABORETU LEKARSKIEGO



I. DANE TECHNICZNE

Średnica siedziska	330 mm
Średnica podstawy	600 mm
Wysokość minimalna	410 mm
Wysokość maksymalna	540 mm

II. BUDOWA

1. Siedzisko pokryte tapicerką (skaj).
2. Elementy plastikowe



III. OBSŁUGA

Obsługa taboretu polega na regulowaniu wysokości za pomocą siłownika gazowego.

IV. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych.

Skaj. Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki.

W przypadku silnych zabrudzeń do przetrucia powierzchni można zastosować 25% (max 40%) roztwór alkoholu etylowego.

Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej; prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

V. DEZYNFEKCJA

Dezynfekować spirytusem i sporadycznie 5% Lizolem. Przykładowe środki dezynfekujące: „Bechtozid Spray”, „Incidin Plus”, „Incidur”.