



CORRADOMED
Sp. z o. o.


25-825 Kielce, ul. Dobromyśl 5
tel. 41 346-47-73
fax 41 346-42-40
biuro@corradomed.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STANOWISKO DO POBIERANIA

KRWI

COR-2 (z podłokietnikiem i szklaną **półką)**

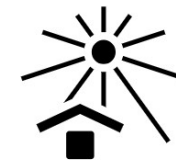

wersja 1.0 wydana 07.2024



I. DANE TECHNICZNE

Całkowita wysokość	900 mm
Całkowita szerokość	900 mm
Szerokość podstawy	700 mm
Całkowita głębokość	800 mm
Głębokość podstawy	700 mm
Waga	17 kg
Dopuszczalne obciążenie	120 kg

II ZASTOSOWANIE

Stanowisko do pobierania krwi jest prostym i praktycznym rozwiązaniem ułatwiającym sprawne przeprowadzanie zabiegu iniekcji, zarówno na prawym jak i lewym przedramieniu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu praktycznego rozwiązania polegającego na możliwości zmiany położenia podłokietnika o kąt 180 stopni, zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90 stopni jak również możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta.

Stanowiska stanowią doskonałe wyposażenie gabinetów lekarskich.

III. OBSŁUGA

Zmianę położenia stanowiska z prawego na lewe lub odwrotnie dokonujemy poprzez: poluzowanie pokręćta umieszczonego pod podłokietnikiem i przekręcenie podłokietnika o 180° przy jednoczesnej zmianie położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90°.

Po ustawieniu podłokietnika w odpowiedniej wysokości należy dokręcić pokręćta.

IV. DEZYNFEKCJA

Stanowisko do pobierania krwi jest wyrobem wielokrotnego użytku.

W celu zachowania należytego stanu higieny po każdorazowym użyciu przetrzeć gazą nasączoną środkiem dezynfekcyjnym (Virkon, Incodyna) lub spryskać aerosolem odkażającym np. Desprey zachowując czas ekspozycji

zależnie od aktualnych wymogów epidemiologicznych. W każdym przypadku po użyciu środka dezynfekcyjnego zaleca się umycie powierzchni tapicerowanej preparatem z dodatkiem detergentu i wytarcie do sucha.

W przypadku metalowych konstrukcji nie zaleca się środków dezynfekcyjnych zawierających chlor z uwagi na wystąpienie ryzyka korozji.

V. UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Stanowisko przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
2. W czasie zabiegu na stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
3. Nie dopuszcza się przenoszenia stanowiska wraz z pacjentem.
4. Zabrania się gwałtownego siadania na stanowisku (wskakiwania).
5. Stanowisko powinno być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła.
6. Stanowiska nie należy narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie tapicerki.
7. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
8. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie stanowią podstawy do reklamacji.

VI. ZALECENIA

1. Użytkować stanowisko zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwacłonkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.