

PL 815-820-920

Podkolanówki bawełniane ze stopniowanym uciskiem dostępne w następujących stopniach ucisku w okolicy kostki: Art.815-820 - **18-22 mmHg** - ucisk średni, zalecany dla osób z chronicznymi zaburzeniami krążenia o niewielkim nasileniu, przy żylakach, obrzękach kończyn oraz w ciąży. Art. 920 - **22-27 mmHg** - ucisk mocny, zalecany w przypadkach poważnych zaburzeń krążenia oraz przy żylakach, obrzękach, w stanach pooperacyjnych, w przypadkach zapalenia żył oraz w celu zapobiegania zakrzepicy żył. **Użytkowanie:** Wyrób należy zakładać rano przed wstaniem z łóżka. Prawidłowe użytkowanie ilustruje diagram z boku pudełka. Dla zapewnienia odpowiedniej skuteczności wyrobu dobierz właściwy rozmiar według tabeli rozmiarów. **Przeciwwskazania:** Poważne zaburzenia krążenia tętniczego, świeżo nabyta lub głęboka zakrzepica żył, niedrożność tętnic obwodowych, dermatozy, zakażenia z wysiękiem i obrzękiem. Należy zdjąć produkt przed snem. Wyrób medyczny klasy 1. Konieczne jest zgłaszanie każdego poważnego incydentu jaki miał miejsce w związku z dostarczonym przez nas wyrobem medycznym do producenta oraz właściwego organu państwa członkowskiego, w którym się znajdujesz. www.relaxsan.com.pl