

Informacje o bezpieczeństwie – Blepha EyeBag®

Blepha EyeBag® to specjalistyczna, wielorazowa maseczka termiczna na oczy zaprojektowana z myślą o bezpiecznym i skutecznym wsparciu w leczeniu:

zespołu suchego oka,

dysfunkcji gruczołów Meiboma (MGD),

zapalenia brzegów powiek (blepharitis),

gradówek i jęczmieni.

Skład i bezpieczeństwo materiałów

Wykonana ręcznie z naturalnych tkanin: jedwabiu, bawełny i siemienia lnianego.

Bez dodatków zapachowych, barwników i plastiku – idealna dla osób z wrażliwą skórą powiek.

Może być stosowana nawet do 200 razy.

Opakowanie jest w pełni biodegradowalne i nadaje się do recyklingu.

Sposób użycia i bezpieczeństwo termiczne

Maskę należy podgrzewać wyłącznie w kuchence mikrofalowej – proces ten nie tylko zapewnia odpowiednią temperaturę, ale również dezynfekuje maseczkę.

Standardowy czas podgrzewania:

Mikrofalówka > 750 W: ok. 30 sekund

Mikrofalówka ≤ 750 W: ok. 40 sekund

Zawsze sprawdź temperaturę przed użyciem (np. na wewnętrznej stronie nadgarstka).

Nie przegrzewaj – może to prowadzić do poparzeń skóry.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować, jeśli skóra wokół oczu jest:

uszkodzona,

pęknięta,

krwawiąca,

silnie podrażniona.

Nie używać w przypadku alergii na siemię lniane – bardzo rzadkie, ale możliwe.

W razie wystąpienia świądu, zaczerwienienia lub dyskomfortu – natychmiast przerwać stosowanie.

Maseczki nie należy prać ani moczyć – wilgoć i detergenty mogą powodować podrażnienia.

Przechowywanie i higiena

Po użyciu przechowywać maseczkę w oryginalnym opakowaniu – zabezpiecza to przed kurzem i wilgocią.

Talerz w kuchence mikrofalowej powinien być czysty i suchy przed każdym podgrzewaniem.

Czas użytkowania

Przy regularnym stosowaniu (2x dziennie przez 2 tygodnie, a następnie według potrzeb), maseczka wystarcza średnio na 6 miesięcy użytkowania.