

NAZWA PRODUKTU

Ax11_tds0326_Poduszka pod kark BIG

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku osobistego – nie udostępniaj go innym osobom.
 - ☐ Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkowania.
 - ☐ Unikaj stosowania poduszki na niestabilnych, nierównych lub śliskich powierzchniach.
 - ☐ Nie stosuj poduszki w trakcie prowadzenia pojazdu, obsługi maszyn ani wykonywania innych czynności wymagających pełnej koncentracji.
- ☐ Regularnie kontroluj stan techniczny produktu – w przypadku widocznych uszkodzeń nie używaj.
- ☐ Produkt nie jest zabawką – należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed użyciem połóż poduszkę na stabilnej, twardej i poziomej powierzchni, np. podłodze lub macie do ćwiczeń.
- ☐ Ułóż się wygodnie, tak aby krzywizna poduszki znajdowała się dokładnie pod karkiem, a głowa swobodnie opadała do tyłu.
- ☐ Zalecany czas stosowania to 4–5 minut, 2–3 razy dziennie.
- ☐ Oddychaj spokojnie i staraj się maksymalnie rozluźnić mięśnie szyi oraz ramion.
- ☐ Produkt można stosować w trakcie czytania, oglądania telewizji lub jako wsparcie podczas odpoczynku.
- ☐ Regularne stosowanie wpływa korzystnie na redukcję napięcia mięśniowego oraz poprawę ułożenia kręgosłupa szyjnego.

- ☐ Produkt nie wymaga specjalnej konserwacji – po użyciu należy przetrzeć go suchą lub lekko wilgotną szmatką..

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować w przypadku świeżych urazów, złamań, stanów zapalnych lub po zabiegach chirurgicznych w obrębie kręgosłupa szyjnego.
- ☐ Osoby cierpiące na przewlekłe choroby neurologiczne, reumatyczne lub naczyniowe powinny skonsultować użycie produktu z lekarzem.
- ☐ Nie stosować w przypadku zawrotów głowy, nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń równowagi bez wcześniejszej konsultacji medycznej.
- ☐ Nie stosować dłużej niż zalecany czas bez nadzoru specjalisty – zbyt długie przebywanie w jednej pozycji może wywołać dyskomfort lub pogorszenie objawów.
- ☐ W razie nasilenia bólu, zawrotów głowy, mrowienia lub jakichkolwiek innych niepokojących objawów należy natychmiast przerwać używanie produktu i skontaktować się z lekarzem.