

NAZWA PRODUKTU

A12_tds0641_Zestaw do wyciągania kleszczy

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ❓ Produkt nie jest zabawką – należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.
- ❓ Narzędzia mają ostre lub precyzyjne końcówki – należy zachować ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć skaleczeń.
- ❓ Nie należy stosować nadmiernej siły podczas wyciągania kleszcza – może to spowodować uraz skóry lub pozostawienie fragmentów pasożyta.
- ❓ Po każdym użyciu wszystkie narzędzia należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować.
- ❓ Przechowywać zestaw w suchym, zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania UV.
- ❓ Chronić przed dostępem do chemikaliów, wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ❓ Przed przystąpieniem do usuwania kleszcza upewnij się, że narzędzie jest czyste i gotowe do użycia.
- ❓ Delikatnie rozchyl sierść zwierzęcia lub odsuń włosy u człowieka, by dobrze widzieć miejsce wkłucia pasożyta.
- ❓ Wybierz odpowiednią pęsetę lub haczyk w zależności od wielkości kleszcza i jego umiejscowienia.
- ❓ Uchwyć kleszcza jak najbliżej skóry, a następnie wyciągaj go zdecydowanym, ale płynnym ruchem – bez szarpania.

❓ Po usunięciu dokładnie oczyścić ranę środkiem dezynfekującym, a narzędzia umyć i przechować w etui.

❓ Zaleca się obserwację miejsca po usunięciu kleszcza przez kilka dni – w razie wystąpienia objawów stanu zapalnego lub pogorszenia samopoczucia należy skontaktować się z lekarzem lub weterynarzem.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

❓ Nie stosować na zwierzętach bardzo pobudzonych lub agresywnych bez odpowiedniego zabezpieczenia.

❓ Nie stosować narzędzi w okolicach oczu, uszu wewnętrznych ani w miejscach trudno dostępnych bez doświadczenia.

❓ Produkt nie zastępuje konsultacji medycznej – w przypadku trudności z usunięciem pasożyta lub podejrzenia zakażenia należy zasięgnąć porady specjalisty.

❓ Nie stosować narzędzi do innych celów niż usuwanie kleszczy – może to spowodować uszkodzenie produktu lub ryzyko dla zdrowia.

❓ Nie używać zestawu w przypadku jego widocznego uszkodzenia, deformacji lub zanieczyszczenia, które nie da się usunąć.