

NAZWA PRODUKTU

tds0347_Zestaw klamerek na wrastające paznokcie

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem każdą klamrę należy zdezynfekować środkiem antybakteryjnym.
- ☐ Upewnij się, że paznokieć oraz skóra wokół są czyste i suche przed montażem klamry.
- ☐ Podczas montażu klamry zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić płytki paznokcia ani skóry wokół niego.
- ☐ Nie dopasowuj klamry na siłę – wybierz rozmiar odpowiedni do szerokości paznokcia.
- ☐ W przypadku uszkodzenia klamry nie kontynuuj jej używania.
- ☐ Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokiej temperatury.
- ☐ Po zakończeniu stosowania klamry umyj i zdezynfekuj ją lub bezpiecznie zutylizuj.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed użyciem dokładnie umyj i osusz stopy oraz paznokcie.
- Dobierz odpowiedni rozmiar klamry do szerokości paznokcia.
- Montuj klamrę delikatnie, zaczepiając ją o boczne krawędzie paznokcia tak, aby unosiła jego brzegi.
- Podczas pierwszego użycia może pojawić się uczucie ucisku – jest to naturalne i świadczy o prawidłowym działaniu produktu.
- W razie potrzeby zabezpiecz klamrę plastrem, aby uniknąć jej przesuwania się lub odpadnięcia.
- Noś klamrę zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem – zazwyczaj przez kilka dni do tygodnia.
- Regularnie kontroluj stan paznokcia i higienę stóp podczas użytkowania.
- W razie potrzeby wymień klamrę na nową zgodnie z instrukcją.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować klamry na uszkodzoną, krwawiącą lub zakażoną skórę.
- ☐ Nie używać w przypadku stanu zapalnego wału paznokciowego, grzybicy paznokci lub innych chorób dermatologicznych bez konsultacji z lekarzem.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do leczenia poważnych przypadków wrastających paznokci – w takich sytuacjach należy skonsultować się z podologiem lub lekarzem.
- ☐ Nie stosować klamry u dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- ☐ Jeśli pojawi się silny ból, obrzęk, zaczerwienienie lub inna niepokojąca reakcja – natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- ☐ Produkt nie zastępuje konsultacji medycznej ani leczenia chirurgicznego w przypadkach zaawansowanych.