

NAZWA PRODUKTU

b20_tds0242_Zestaw opasek na palce

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego – nie należy go stosować na otwarte rany, skaleczenia ani miejsca po zabiegach chirurgicznych.
- ☐ Należy unikać noszenia opaski zbyt długo bez przerwy, aby nie zaburzyć naturalnego krążenia krwi w palcach.
- ☐ Nie stosować w przypadku uczulenia na materiały tekstylne lub objawów alergii kontaktowej – w razie podrażnień należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- ☐ Regularnie sprawdzać stan techniczny opasek – uszkodzone lub rozciągnięte elementy mogą nie spełniać swojej funkcji ochronnej.
- ☐ Przechowywać produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed założeniem upewnij się, że palce są czyste i suche – zapobiega to przesuwaniu się opaski w trakcie aktywności.
- Opaskę należy delikatnie naciągnąć i nasunąć na palec – elastyczny materiał zapewnia dobre dopasowanie.
- Można stosować na dowolny palec, także w celu ochrony przed otarciami lub jako wsparcie dla drobnych urazów.
- Po użyciu warto opaskę przewietrzyć, a w razie potrzeby delikatnie wyprać ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Zalecana rotacja między opaskami w zestawie w celu utrzymania ich elastyczności i higieny.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować jako zamiennika opatrunków medycznych, stabilizatorów ani ortezy.
- Nie używać na uszkodzoną lub zainfekowaną skórę – może to pogorszyć stan zdrowia skóry i opóźnić gojenie.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ryzyko zadławienia lub nieprawidłowego użycia.
- Nie suszyć opaski na grzejniku ani w suszarce – może to spowodować utratę elastyczności i deformację materiału.
- Nie zaleca się noszenia opasek podczas snu, ponieważ mogą uciskać palce i powodować dyskomfort lub zaburzenia krążenia.