

NAZWA PRODUKTU

Ax14_tds0401_Czapka na migrenę ból głowy gorączkę

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy opaska i kompres żelowy nie są uszkodzone.
- Nie stosuj opaski bezpośrednio na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.
- Unikaj stosowania opaski przez dłuższy czas w jednej pozycji, aby zapobiec odmrożeniom lub podrażnieniom skóry.
- Po zamrożeniu kompresu unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z bardzo zimnym żelem – najlepiej używać opaski zgodnie z instrukcją, aby zapewnić komfort użytkowania.
- Przechowuj opaskę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed użyciem włóż opaskę do zamrażarki na około 2 godziny, aż kompres osiągnie odpowiednią temperaturę chłodzenia.
- Nakładaj opaskę na czoło lub okolice głowy, dopasowując ją tak, aby zapewnić równomierny ucisk i komfort.
- Czas stosowania kompresu chłodzącego nie powinien przekraczać 15-20 minut jednorazowo.
- Po użyciu opaskę można ponownie schłodzić lub, jeśli instrukcja to dopuszcza, podgrzać, aby stosować ją jako kompres ciepły.
- Przed ponownym użyciem sprawdź stan opaski i kompresu..

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować u osób z nadwrażliwością na zimno, problemami z krążeniem lub chorobami skóry, bez konsultacji z lekarzem.
- ☐ Nie używać na obszarach z otwartymi ranami, stanami zapalnymi lub wysypką.
- ☐ Unikać stosowania u dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- ☐ W przypadku wystąpienia podrażnień, zaczerwienienia lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie i, w razie potrzeby, skonsultować się z lekarzem.
- ☐ Produkt nie zastępuje profesjonalnej terapii medycznej w przypadku przewlekłych bólów głowy lub migren.