

NAZWA PRODUKTU

d1_F70 Gorset porowaty (XL NA OPAKOWANIU)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy gorset nie posiada uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na komfort lub bezpieczeństwo użytkowania.
- ☐ Nie zakładaj gorsetu zbyt ciasno, aby nie ograniczać swobodnego przepływu krwi i nie powodować dyskomfortu.
- ☐ Unikaj noszenia gorsetu przez dłuższy czas bez przerw, aby nie obciążać niepotrzebnie organizmu.
- ☐ Przechowuj gorset w suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i wilgoci.
- ☐ W przypadku podrażnień skóry lub uczucia dyskomfortu natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z lekarzem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Zakładaj gorset na czystą i suchą skórę, aby zapobiec podrażnieniom i zapewnić komfort noszenia.
- ☐ Dostosuj regulację zapięć tak, aby gorset dobrze przylegał, ale nie uciskał zbyt mocno.
- ☐ Gorset można stosować podczas codziennych aktywności, takich jak praca, spacer czy lekki trening, ale nie jest przeznaczony do intensywnego wysiłku fizycznego.
- ☐ Regularnie zdejmuj gorset na krótki czas w ciągu dnia, aby ciało mogło odpocząć.
- ☐ Produkt można prać ręcznie w letniej wodzie z delikatnym detergentem; po praniu suszyć w przewiewnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używaj gorsetu jeśli masz choroby układu krążenia, problemy z oddychaniem, skórne schorzenia lub inne przeciwwskazania medyczne bez konsultacji z lekarzem.
- ☐ Gorset nie jest przeznaczony do noszenia podczas snu ani podczas intensywnych ćwiczeń fizycznych.
- ☐ Nie stosuj produktu bezpośrednio po operacjach lub poważnych urazach brzucha bez porozumienia z lekarzem.
- ☐ Nie używaj gorsetu jeśli odczuwasz ból, drętwienie, mrowienie lub inne niepokojące objawy podczas noszenia.
- ☐ Produkt nie powinien być używany przez kobiety w ciąży..