

NAZWA PRODUKTU

Bx4_tds0398_Ściągacz opaska na nadgarstek BLUE-treningowa

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń materiału lub taśmy mocującej.
- ☐ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego – nie stosować na otwarte rany ani podrażnioną skórę.
- ☐ Po intensywnym wysiłku fizycznym zaleca się zdejmowanie stabilizatora w celu umożliwienia regeneracji skóry i tkanek.
- ☐ Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
- ☐ Unikać kontaktu materiału z ostrymi przedmiotami, które mogą doprowadzić do uszkodzenia struktury stabilizatora.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Zakładać stabilizator na suchą i czystą skórę, dopasowując taśmę mocującą w sposób zapewniający komfort i odpowiednią kompresję.
- Stabilizator można nosić zarówno na lewej, jak i prawej ręce – należy dopasować kierunek nałożenia do preferencji użytkownika.
- Podczas noszenia nie należy odczuwać drętwienia ani silnego ucisku – w razie takich objawów należy poluzować zapięcie lub zdjąć produkt.
- Po zakończeniu użytkowania produkt należy osuszyć i pozostawić w przewiewnym miejscu, co wydłuży jego żywotność.
- Zalecane jest pranie ręczne w letniej wodzie z delikatnym detergentem. Nie używać wybielaczy ani suszarek bębnowych.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować stabilizatora w przypadku aktywnej infekcji skórnej, zmian dermatologicznych lub silnych obrzęków w obrębie nadgarstka.
- ☐ Osoby z zaburzeniami krążenia, cukrzycą lub chorobami układu nerwowego powinny skonsultować użycie stabilizatora z lekarzem.
- ☐ Nie zaleca się noszenia produktu przez długi, nieprzerwany czas bez nadzoru specjalisty – może to prowadzić do pogorszenia krążenia.
- ☐ W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, reakcji alergicznej lub nasilonego bólu należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony jako substytut leczenia – w przypadku kontuzji lub przewlekłego bólu należy zasięgnąć porady medycznej.