

NAZWA PRODUKTU

Cx7_tds0400_Stabilizator kciuka GREEN LINE z szyną

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
- ☐ Stabilizator powinien być zakładany wyłącznie na suchą, czystą skórę lub opatrunek.
- ☐ Nie należy zbyt mocno zaciskać pasków stabilizujących – zbyt silny ucisk może zaburzyć krążenie krwi.
- ☐ Regularnie sprawdzać stan materiału oraz metalowej szyny – w przypadku uszkodzeń, należy zaprzestać użytkowania.
- ☐ Produkt powinien być przechowywany w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- ☐ Nie stosować produktu przez całą dobę bez przerwy, chyba że lekarz zaleci inaczej.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Stabilizator przeznaczony jest do tymczasowego unieruchomienia kciuka i nadgarstka w przypadku urazów, stanów zapalnych oraz w trakcie rekonwalescencji.
- ☐ Może być stosowany zarówno profilaktycznie (np. podczas uprawiania sportu), jak i w okresie pourazowym.
- ☐ Produkt należy dostosować do dłoni przy użyciu regulowanych pasków i rzepów, dbając o odpowiednie przyleganie bez wywoływania dyskomfortu.
- ☐ Orteza może być noszona zarówno na lewej, jak i na prawej ręce.
- ☐ Po każdorazowym użyciu zaleca się wietrzenie produktu w celu zachowania higieny.
- ☐ Czyszczenie produktu powinno odbywać się ręcznie, w letniej wodzie, bez użycia detergentów, wybielaczy czy środków chemicznych.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować w przypadku uczulenia na materiały syntetyczne, z których wykonany jest produkt.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym – w przypadku poważnych urazów, złamań lub przewlekłych dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Nie stosować na otwarte rany, sącące się zmiany skórne ani stany zapalne skóry bez konsultacji z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, mrowienia lub pogorszenia stanu dłoni lub kciuka, należy natychmiast zaprzestać używania stabilizatora i skontaktować się z lekarzem.
- Nie zaleca się długotrwałego, nieprzerwanego noszenia produktu bez konsultacji ze specjalistą – skóra i stawy wymagają okresowego odpoczynku.