

NAZWA PRODUKTU

C6_tds0391_Opaska na rękę wiązana GREEN LINE S/M

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu.
- ☐ Nie stosować produktu na uszkodzoną, zranioną lub podrażnioną skórę.
- ☐ Podczas noszenia stabilizatora należy kontrolować krążenie w dłoni – w przypadku drętwienia, mrowienia lub zasinienia należy natychmiast zdjąć opaskę.
- ☐ Produkt powinien być przechowywany w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.
- ☐ Nie należy zbyt mocno zaciskać paska kompresyjnego – może to prowadzić do nadmiernego ucisku i ograniczenia przepływu krwi.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do użytku ciągłego – zaleca się regularne zdejmowanie go w celu umożliwienia odpoczynku skóry.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Stabilizator należy zakładać na suchą, czystą skórę. Może być stosowany zarówno na prawej, jak i lewej ręce.
- ☐ Przed nałożeniem zaleca się delikatne rozgrzanie nadgarstka poprzez lekkie rozruszanie stawu.
- ☐ Zapięcie na rzep należy dopasować w taki sposób, aby opaska dobrze przylegała do nadgarstka, zapewniając wsparcie, ale nie powodując ucisku.
- ☐ Produkt najlepiej stosować w trakcie aktywności fizycznej, rehabilitacji, pracy przy komputerze lub codziennych obowiązkach, w zależności od potrzeb.
- ☐ Opaskę można czyścić ręcznie w letniej wodzie, bez użycia detergentów, wybielaczy lub środków chemicznych.
- ☐ Po praniu należy pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia na płasko, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować w przypadku uczulenia na materiały syntetyczne, z których wykonany jest stabilizator.
- Nie zaleca się używania produktu w przypadku świeżych złamań lub poważnych urazów bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
- Osoby z zaburzeniami krążenia, cukrzycą, chorobami skóry lub innymi schorzeniami przewlekłymi powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu.
- Nie stosować stabilizatora przez całą dobę bez przerwy, o ile nie zaleci tego lekarz.
- W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, takich jak nasilenie bólu, obrzęk, drętwienie lub pogorszenie ruchomości, należy przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym – nie może zastępować profesjonalnej diagnostyki ani leczenia.