

NAZWA PRODUKTU

C5_tds0546_Stopery zatyczki do uszu MULTI

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed użyciem dokładnie umyj ręce, aby zapobiec przenoszeniu zanieczyszczeń do kanału słuchowego.
- ☐ Przed każdym użyciem sprawdź stan zatyczek — nie używaj uszkodzonych lub zdeformowanych wkładek.
- ☐ Utrzymuj zatyczki w czystości, regularnie je myjąc zgodnie z zaleceniami producenta.
- ☐ Nie udostępniaj zatyczek innym osobom w celu zachowania higieny i bezpieczeństwa.
- ☐ Przechowuj zatyczki w dołączonym etui, aby uniknąć ich zabrudzenia lub zgubienia.
- ☐ W przypadku wystąpienia bólu, podrażnienia lub dyskomfortu podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed założeniem zatyczek oczyść i osusz uszy, aby zapewnić optymalne dopasowanie i skuteczność tłumienia dźwięków.
- ☐ Delikatnie wprowadź zatyczki do ucha, nie wciskając ich zbyt głęboko, aby nie powodować dyskomfortu.
- ☐ Po użyciu zatyczki należy umyć ciepłą wodą z łagodnym mydłem i dokładnie wysuszyć przed ponownym zastosowaniem.
- ☐ Przechowuj zatyczki w dołączonym pudełku, co pozwala na zachowanie higieny i wygodne przenoszenie.
- ☐ Zatyczki są wielokrotnego użytku, jednak zaleca się regularną kontrolę stanu materiału oraz wymianę w przypadku utraty elastyczności lub uszkodzeń.
- ☐ Produkt jest przeznaczony do ochrony słuchu podczas snu, pracy w hałaśliwym otoczeniu, pływania, podróży lub innych sytuacji wymagających redukcji hałasu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować w przypadku stanu zapalnego, infekcji lub uszkodzeń kanału słuchowego.
- Nie używać przez dłuższy czas bez przerw, aby uniknąć podrażnień ucha.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie stosować, jeśli występuje uczulenie lub nadwrażliwość na silikon.
- Nie używać zatyczek w sytuacjach, gdy konieczna jest pełna percepcja dźwięków otoczenia (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn).
- W przypadku dolegliwości bólowych, zawrotów głowy lub pogorszenia słuchu, należy zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem