

NAZWA PRODUKTU

tds0340_Stabilizator haluksa 2szt.

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz skonsultować się z lekarzem, szczególnie w przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych.
- Orteza powinna być stosowana zgodnie z przeznaczeniem – wyłącznie na stopy dotknięte deformacją palucha koślawego.
- Produkt przeznaczony jest do użytku osobistego – nie należy go udostępniać innym osobom ze względów higienicznych.
- Nie stosować, jeśli produkt jest uszkodzony, rozciągnięty lub z widocznymi oznakami zużycia.
- Podczas użytkowania należy obserwować skórę – w przypadku podrażnień, otarć lub zaczerwienienia należy przerwać stosowanie.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i światła słonecznego..

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Aparat najlepiej stosować w godzinach nocnych lub podczas odpoczynku w domu – nie jest przystosowany do intensywnego chodzenia ani do użytku z obuwem.
- ☐ Zakładaj ortezę zgodnie z oznaczeniami strony – odpowiednio na prawą i lewą stopę, dopasowując paski na rzepy do indywidualnych potrzeb.
- ☐ Unikaj zbyt mocnego zaciskania pasków – powinny one zapewniać stabilizację, ale nie powodować ucisku ani ograniczenia krążenia krwi.
- ☐ Orteza może być używana codziennie – regularne stosowanie przez kilka godzin dziennie zwiększa efektywność działania.
- ☐ Po użyciu zaleca się delikatne oczyszczenie produktu wilgotną szmatką i pozostawienie do całkowitego wyschnięcia przed ponownym założeniem.
- ☐ W przypadku dyskomfortu lub pogorszenia stanu stopy należy skonsultować się z ortopedą lub fizjoterapeutą.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować w przypadku otwartych ran, zakażeń skóry, silnych stanów zapalnych lub świeżych urazów w obrębie stopy.
- ☐ Nie zaleca się stosowania w trakcie intensywnych aktywności fizycznych, biegania lub noszenia ortezy poza warunkami domowymi.
- ☐ Produkt nie zastępuje leczenia operacyjnego w przypadku poważnych deformacji – jego zastosowanie ma charakter wspomagający lub profilaktyczny.
- ☐ Nie należy używać u dzieci bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem specjalistą.
- ☐ W przypadku deformacji stopy innego typu niż paluch koślawy (np. płaskostopie poprzeczne, ostroga piętowa) stosowanie aparatu może być nieskuteczne lub niewskazane.
- ☐ Nie kontynuować użytkowania, jeśli występuje nasilony ból, drętwienie lub pogorszenie ruchomości stawu.