

NAZWA PRODUKTU

B6_tds0379_Stabilizator haluksa 2szt. Z szyną metalową

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją użytkowania.
- Zakładaj aparat korekcyjny na czystą i suchą skórę, aby zapobiec podrażnieniom.
- Regularnie sprawdzaj stan materiału i mocowań, aby uniknąć uszkodzeń podczas użytkowania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, pęknięcia lub deformacje.
- Unikaj nadmiernego napięcia pasków, które może powodować ucisk i zaburzać krążenie krwi.
- W przypadku wystąpienia bólu, zaczerwienienia, obrzęku lub innych niepokojących objawów, przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj aparatu podczas intensywnej aktywności fizycznej lub na zewnątrz w trudnych warunkach.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Aparat korekcyjny stosuj regularnie, najlepiej zgodnie z zaleceniami lekarza lub specjalisty.
- Używaj ortezy przede wszystkim w nocy oraz podczas lekkiego poruszania się w domu, aby zapewnić odpowiednią korekcję i komfort.
- Dopasuj paski na rzepy tak, aby aparat stabilnie przylegał do stopy, ale nie powodował ucisku.
- Systematycznie czyść ortezę ręcznie, używając delikatnych środków myjących i dokładnie osusz przed kolejnym użyciem.
- Unikaj prania w pralce lub suszenia na bezpośrednim źródle ciepła.
- Regularnie kontroluj stan skóry pod aparatem, aby zapobiec podrażnieniom.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować w przypadku otwartych ran, infekcji skóry lub innych stanów zapalnych w miejscu aplikacji.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do całkowitego leczenia haluksów, a jedynie do wspomagania korekcji i zmniejszania dyskomfortu.
- ☐ Nie używać aparatu u osób z zaburzeniami krążenia bez konsultacji z lekarzem.
- ☐ Nie stosować w przypadku znanych alergii na materiały użyte w produkcie.
- ☐ Nie używać aparatu podczas intensywnych ćwiczeń fizycznych lub aktywności wymagających dużej mobilności stopy.
- ☐ W przypadku wystąpienia bólu, podrażnień lub innych niepokojących objawów należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.