

NAZWA PRODUKTU

c5_tds0492_Stabilizator barku

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem upewnij się, że stabilizator jest czysty i suchy.
- ☐ Nie używaj ortezy na uszkodzoną, podrażnioną lub zakażoną skórę.
- ☐ Unikaj długotrwałego stosowania bez przerw, aby zapobiec nadmiernemu uciskowi i ograniczeniu krążenia.
- ☐ Przechowuj produkt w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła.
- ☐ W przypadku wystąpienia podrażnień lub alergii natychmiast przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem..

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Załóż stabilizator na czystą i suchą skórę, dopasuj go za pomocą rzepów, tak aby zapewnić odpowiednią stabilizację i komfort.
- Używaj ortezy zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty.
- Regularnie zdejmuj i czyść stabilizator zgodnie z instrukcją, aby utrzymać higienę i właściwości materiału.
- Unikaj noszenia ortezy podczas snu, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub nadmierne uciskanie, odpowiednio poluzuj rzepy.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosuj stabilizatora w przypadku otwartych ran, infekcji skóry lub stanów zapalnych w obrębie barku.
- ☐ Nie używaj produktu jako jedynej formy leczenia bez konsultacji ze specjalistą.
- ☐ Nie nosić ortezy, jeśli występują zaburzenia krążenia lub obrzęki bez konsultacji lekarskiej.
- ☐ Nie dopuszczaj do nadmiernego zaciskania stabilizatora, które może powodować ból lub utrudniać przepływ krwi.