

NAZWA PRODUKTU

Ax11_tds0005_Aspirator do nosa manualny

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed każdym użyciem dokładnie umyj ręce oraz sprawdź stan techniczny aspiratora – nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty lub zanieczyszczony.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru podczas używania aspiratora.
- Nie używaj aspiratora, jeśli u dziecka występują widoczne zmiany chorobowe w obrębie nosa (np. krwawienie, silne podrażnienie, infekcje ropne).
- Po każdym użyciu aspirator należy dokładnie wyczyścić i osuszyć. Regularna dezynfekcja wszystkich elementów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.
- Nie używaj zbyt dużej siły ssącej – zbyt intensywne odsysanie może podrażnić błonę śluzową nosa dziecka.
- Przechowuj produkt w etui, w suchym i czystym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed użyciem upewnij się, że dziecko znajduje się w stabilnej pozycji (np. leżącej lub półsiedzącej), co zapewnia komfort i bezpieczeństwo.
- Delikatnie umieść końcówkę aspiratora w jednym otworze nosowym dziecka, a drugą stronę przyłóż do ust, aby zassać śluz – wykonuj to powoli i kontrolowanie.
- Po oczyszczeniu jednego otworu nosowego, powtórz czynność dla drugiego.
- Po zakończeniu zabiegu rozmontuj aspirator i umyj wszystkie elementy wodą z łagodnym środkiem myjącym lub przegotowaną wodą.
- Dla zapewnienia maksymalnej higieny zaleca się okresową wymianę końcówek kontaktujących się z noskiem dziecka.
- Aspirator można stosować kilka razy dziennie, jednak zawsze należy zachować umiar i obserwować reakcję dziecka.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować aspiratora u dzieci z silną infekcją nosa, zatok lub ucha bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- Nie używać aspiratora w przypadku stwierdzonej alergii dziecka na którykolwiek z materiałów użytych w produkcji.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez więcej niż jedno dziecko, jeśli nie jest odpowiednio dezynfekowany.
- Nie stosować siły podczas wkładania końcówki do nosa dziecka – może to spowodować urazy śluzówki.
- Nie gotować aspiratora, jeśli producent nie wskazał takiej metody dezynfekcji – może to spowodować deformację elementów.
- Aspirator nie zastępuje leczenia infekcji – jego stosowanie ma charakter wspomagający i objawowy.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.