

NAZWA PRODUKTU

A5_tds0380_Orteza usztywniacz palca z szyną

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą w celu potwierdzenia zasadności stosowania ortezy.
- Orteza nie powinna być stosowana na otwarte rany, skaleczenia lub stany zapalne skóry bez uprzedniego zabezpieczenia opatrunkiem.
- Należy regularnie sprawdzać stan skóry pod ortezą, zwłaszcza przy długotrwałym noszeniu.
- Unikać nadmiernego zaciskania paska mocującego – może to prowadzić do zaburzenia krążenia krwi.
- W przypadku odczuwania bólu, mrowienia, drętwienia lub obrzęku należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Orteza przeznaczona jest do stabilizacji jednego palca dłoni – najczęściej stosowana przy urazach końcowego paliczka lub stawu międzypaliczkowego dalszego.
- Załóż ortezę tak, aby metalowa szyna znajdowała się po stronie grzbietowej lub brzusznej palca – zgodnie z zaleceniem lekarza.
- Ustaw odpowiednie dopasowanie za pomocą rzepów – powinno być stabilne, ale nie uciskające.
- Orteza może być stosowana zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy – według indywidualnych potrzeb pacjenta.
- Aby zachować higienę, zaleca się regularne czyszczenie ręczne neoprenu w letniej wodzie z delikatnym detergentem, bez użycia wybielaczy i suszarek bębnowych.

- W przypadku pogorszenia stanu palca lub braku poprawy w czasie rekonwalescencji – skonsultuj dalsze stosowanie z lekarzem prowadzącym.
- Po zakończeniu czyszczenia dokładnie oczyść narzędzia z zanieczyszczeń i schowaj do etui.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować ortezy bez wcześniejszej diagnozy medycznej w przypadku bólu niewiadomego pochodzenia.
- Przeciwwskazane u osób z zaburzeniami krążenia, ciężką neuropatią obwodową lub nadwrażliwością skóry na materiały syntetyczne.
- Nie używać jako zamiennika profesjonalnego leczenia ortopedycznego przy złamaniach, zwichnięciach lub pęknięciach bez potwierdzenia lekarza.
- Nie stosować dłużej, niż zalecono – długotrwałe unieruchomienie może prowadzić do ograniczenia ruchomości stawów lub osłabienia mięśni.
- Nie używać ortezy na noc bez wcześniejszego sprawdzenia, czy nie powoduje ucisku lub dyskomfortu w czasie snu.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.