

NAZWA PRODUKTU

C8_tds0127_Opaska na dłoń nadgarstek

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy stabilizator nie posiada widocznych uszkodzeń.
- ☐ Używaj stabilizatora zgodnie z przeznaczeniem, nie stosuj go na otwarte rany lub podrażnioną skórę.
- ☐ W przypadku wystąpienia uczulenia, podrażnienia lub nadmiernego zaczerwienienia skóry, przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- ☐ Unikaj noszenia stabilizatora przez długi czas bez przerw, aby skóra mogła oddychać.
- ☐ Regularnie czyść stabilizator zgodnie z instrukcją producenta, aby zapobiec namnażaniu się bakterii i grzybów.
- ☐ Nie naciągaj taśmy mocującej nadmiernie, aby nie ograniczać krążenia krwi.
- ☐ Przechowuj produkt w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Dopasuj stabilizator tak, aby zapewniał wsparcie, ale nie uciskał nadgarstka i nie ograniczał swobody ruchów.
- ☐ Wsuń kciuk w przeznaczony otwór, aby stabilizator prawidłowo utrzymał się na ręce.
- ☐ Reguluj taśmę samoprzylepną, aby uzyskać komfortowe i stabilne dopasowanie.
- ☐ Stosuj stabilizator podczas aktywności fizycznej lub w trakcie rehabilitacji, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.
- ☐ Po użyciu zdejmij stabilizator i pozwól skórze odpocząć, szczególnie po intensywnym treningu.
- ☐ Regularnie sprawdzaj stan materiału i elementów mocujących, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia poważnych urazów bez konsultacji z lekarzem.
- Nie stosuj stabilizatora, jeśli masz alergię na materiały użyte w produkcie (np. neopren, nylon).
- Nie używaj stabilizatora na rany, otarcia, stany zapalne lub obrzęki, które nie zostały zdiagnozowane przez specjalistę.
- Nie stosuj stabilizatora u osób z zaburzeniami krążenia bez konsultacji z lekarzem.
- Unikaj stosowania stabilizatora w sytuacjach, gdy ograniczenie ruchu nadgarstka może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.
- W przypadku nasilenia bólu lub innych niepokojących objawów podczas użytkowania, zaprzestań używania i skonsultuj się ze specjalistą.