

NAZWA PRODUKTU

A11_tds0394_Opaska na stopę Magnetyczna

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem upewnij się, że opaska nie posiada uszkodzeń ani defektów.
- ☐ Nie stosuj opaski na otwarte rany, skaleczenia, podrażnienia lub stany zapalne skóry.
- ☐ W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, takich jak swędzenie, zaczerwienienie lub podrażnienie, natychmiast przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.
- ☐ Unikaj stosowania opaski podczas snu, jeśli zauważysz jakikolwiek dyskomfort lub problemy z krążeniem.
- ☐ Nie nosić opaski zbyt długo bez przerw, aby skóra mogła swobodnie oddychać.
- ☐ Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- ☐ Regularnie myj opaskę zgodnie z zaleceniami, aby zachować higienę i właściwości materiału.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed założeniem opaski umyj i dokładnie osusz stopę, aby zapewnić komfort noszenia i utrzymanie higieny.
- ☐ Dopasuj opaskę tak, aby była dobrze przylegająca, ale nie uciskała zbyt mocno stawu skokowego ani nie powodowała dyskomfortu.
- ☐ Opaskę można nosić pod skarpetkami oraz w obuwiu, dzięki czemu jest niewidoczna i wygodna podczas codziennych aktywności.
- ☐ Stosuj opaskę regularnie, szczególnie podczas aktywności fizycznej, spacerów lub pracy stojącej, aby wspomagać stabilizację i łagodzenie bólu.
- ☐ W razie potrzeby czyść opaskę delikatnie pod bieżącą wodą i pozostaw do naturalnego wyschnięcia.
- ☐ Unikaj stosowania silnych detergentów lub wybielaczy podczas czyszczenia.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować opaski u osób z rozrusznikiem serca lub innymi urządzeniami elektronicznymi wszczepionymi w organizm bez konsultacji z lekarzem.
- ☐ Nie używać w przypadku poważnych urazów, złamań lub stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.
- ☐ Unikać stosowania u osób z chorobami skóry, które mogą się pogorszyć pod wpływem materiału opaski.
- ☐ Nie zaleca się stosowania opaski u kobiet w ciąży bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- ☐ W przypadku wystąpienia nasilonego bólu, obrzęku lub innych niepokojących objawów, natychmiast przerwij stosowanie i zasięgnij porady medycznej.
- ☐ Produkt nie zastępuje profesjonalnej rehabilitacji ani leczenia medycznego.