

NAZWA PRODUKTU

Cx6_tds0392_Opaska na kolano wiązana XL GREEN

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że produkt nie wywołuje reakcji alergicznej – materiał jest antyalergiczny, ale reakcje indywidualne są możliwe.
- Nie używaj opaski na otwarte rany, uszkodzoną skórę ani w miejscach podrażnień.
- Po każdym intensywnym użyciu zaleca się przepłukanie opaski ręcznie w letniej wodzie, aby uniknąć rozwoju bakterii i zachować higienę.
- Upewnij się, że taśmy mocujące nie są zbyt mocno zaciśnięte – nadmierna kompresja może ograniczyć krążenie.
- Nie stosować przez całą dobę bez przerw – zaleca się regularne zdejmowanie opaski w celu umożliwienia skórze odpoczynku.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Zakładaj opaskę bezpośrednio na suchą i czystą skórę.
- Dobierz odpowiedni rozmiar (w tym przypadku XL) – opaska powinna dobrze przylegać, ale nie uciskać nadmiernie.
- Zalecana jest stosowana podczas aktywności fizycznej, rehabilitacji, a także w celu profilaktyki przeciążeń i kontuzji.
- W przypadku wystąpienia bólu, dyskomfortu lub drętwienia podczas noszenia, należy natychmiast zdjąć opaskę i skonsultować się z lekarzem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować w przypadku świeżych, niezdiagnozowanych urazów bez konsultacji z lekarzem.
- Nie używać przy poważnych schorzeniach naczyniowych kończyn dolnych bez uprzedniej zgody specjalisty.
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia stanów ostrych ani jako zamiennik opieki medycznej.
- Nie należy używać w przypadku silnego obrzęku, niedokrwienia, zaburzeń czucia lub problemów skórnych w okolicy kolana.
- Opaska nie powinna być używana w czasie snu – zaleca się stosowanie jej wyłącznie w trakcie aktywności lub rehabilitacji.