

NAZWA PRODUKTU

C14_tds0504_korektor postawy GRAY Dla dzieci S

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Korektor należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe dopasowanie do sylwetki dziecka.
- Produkt nie powinien być używany w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, snu ani w pozycji leżącej przez długi czas.
- Przed założeniem korektora należy sprawdzić, czy nie powoduje ucisku, ograniczeń w oddychaniu lub dyskomfortu w obrębie barków, pleców lub klatki piersiowej.
- Nie należy zakładać korektora bezpośrednio na skórę – zalecane jest noszenie na lekką warstwę odzieży, aby uniknąć podrażnień.
- Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej, szczególnie w przypadku dzieci.
- W razie wystąpienia zaczerwienienia skóry, bólu lub innych niepokojących objawów, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Rozpocznij stosowanie od 20–30 minut dziennie, a następnie stopniowo zwiększaj czas do 1–2 godzin dziennie w zależności od potrzeb i komfortu użytkownika.
- ☐ Najlepsze rezultaty osiąga się przy regularnym, codziennym użytkowaniu, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich przerw.
- ☐ Korektor należy prać ręcznie lub w pralce w delikatnym cyklu, w temperaturze zgodnej z zaleceniami producenta. Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- ☐ Produkt można nosić pod ubraniem – jest lekki, przewiewny i nie rzuca się w oczy.
- ☐ Korektor wspomaga utrzymanie prawidłowej postawy, ale nie zastępuje ćwiczeń wzmacniających mięśnie grzbietu – zalecane jest połączenie korekcji postawy z aktywnością fizyczną.
- ☐ Nie należy stosować korektora dłużej niż zalecany czas – zbyt długie noszenie może spowodować osłabienie mięśni posturalnych.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Produkt nie jest wyrobem medycznym – w przypadku poważnych wad postawy konieczna jest konsultacja ze specjalistą (lekarz ortopeda, fizjoterapeuta).
- Nie stosować w przypadku otarć, uszkodzeń skóry, infekcji skórnych, chorób dermatologicznych ani uczulenia na materiały syntetyczne.
- Korektor nie powinien być używany przez dzieci poniżej 150 cm wzrostu ani powyżej 165 cm.
- Maksymalna waga użytkownika nie powinna przekraczać 65 kg – stosowanie produktu poza tymi parametrami może być nieskuteczne lub szkodliwe.
- Nie używać korektora przez kilka godzin bez przerwy – może to prowadzić do niepożądanego ucisku lub ograniczenia krążenia.
- Nie udostępniać produktu innym osobom ze względów higienicznych.