

NAZWA PRODUKTU

tds0503_Elektroda żelowa 4x

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem sprawdź, czy elektrody nie są uszkodzone lub wyschnięte.
- Przechowuj elektrody na dołączonej plastikowej podkładce w suchym i zacienionym miejscu, aby przedłużyć ich trwałość.
- Unikaj stosowania elektrod na uszkodzoną, podrażnioną lub zainfekowaną skórę.
- Nie stosuj elektrod na obszary skóry z ranami, oparzeniami lub wysypką.
- Przed każdorazowym użyciem zwilż elektrody kilkoma kroplami wody, jeśli straciły przyczepność

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Elektrody należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami TENS lub EMS zgodnie z instrukcją producenta elektrostymulatora.
- ☐ Przed przyklejeniem elektrod oczyść i osusz skórę w miejscu aplikacji, aby zapewnić dobre przyleganie.
- ☐ Umieść elektrody zgodnie z zaleceniami terapeuty lub instrukcją obsługi urządzenia.
- ☐ Po użyciu odklej elektrody delikatnie i umieść na plastikowej podkładce w celu ochrony warstwy klejącej.
- ☐ Regularnie kontroluj stan elektrod i wymieniaj je, gdy przestaną się dobrze przylegać lub po osiągnięciu maksymalnej liczby użyc (30-50 razy).

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosuj elektrod na obszarach z metalowymi implantami lub rozrusznikiem serca bez konsultacji z lekarzem.
- Unikaj aplikacji elektrod na szyję, głowę, klatkę piersiową w okolicach serca, a także w okolicy oczu i błon śluzowych.
- Nie używaj elektrod podczas ciąży bez zgody lekarza.
- Elektrody nie są przeznaczone do użytku u osób z epilepsją, chorobami serca lub innymi poważnymi schorzeniami bez nadzoru medycznego.
- Nie stosuj produktu, jeśli zauważysz reakcję alergiczną lub podrażnienie skóry. W takim przypadku zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.