

NAZWA PRODUKTU

H5_tds0619_Stabilizator stawu skokowego kostki

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że produkt nie powoduje reakcji alergicznych – dotyczy to zwłaszcza osób uczulonych na neopren lub inne tworzywa sztuczne.
- Zakładaj stabilizator wyłącznie na czystą i suchą skórę, aby uniknąć podrażnień.
 - Produkt nie powinien być noszony przez całą dobę – należy zapewnić skórze odpoczynek i dostęp powietrza.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny stabilizatora – uszkodzenia materiału lub rzepów mogą wpłynąć na skuteczność działania.
- Nie modyfikuj produktu ani nie przycinaj go – może to osłabić jego właściwości stabilizujące.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

-  Zakładaj stabilizator zgodnie z instrukcją – odpowiednie ułożenie i napięcie pasków ma kluczowe znaczenie dla skuteczności wsparcia.
 -  Dostosuj siłę ucisku do swoich indywidualnych potrzeb – produkt powinien przylegać stabilnie, ale nie powodować uczucia drętwienia czy ucisku.
 -  Zalecany do stosowania w czasie aktywności fizycznej lub rehabilitacji po przebytych urazach, takich jak skręcenia, naciągnięcia czy przeciążenia stawu.
 -  Po zakończeniu użytkowania zdejmij produkt i pozostaw go do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

- [?] W przypadku długotrwałego użytkowania, regularnie pierz stabilizator ręcznie w letniej wodzie z delikatnym środkiem piorącym.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- [?] Produkt nie powinien być stosowany na otwarte rany, skaleczenia, infekcje skórne ani inne zmiany dermatologiczne w okolicy kostki.
- [?] Nie zaleca się używania stabilizatora przez osoby z zaburzeniami krążenia w kończynach dolnych bez wcześniejszej konsultacji medycznej.
- [?] W przypadku wystąpienia bólu, mrowienia, nadmiernego ucisku, uczucia chłodu w stopie lub innych objawów niepożądanych, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z lekarzem.
- [?] Produkt nie jest wyrobem medycznym – nie powinien być traktowany jako zamiennik specjalistycznego sprzętu ortopedycznego zaleconego przez lekarza.
- [?] Nie stosować produktu podczas snu lub długotrwałego unieruchomienia bez nadzoru specjalisty.