

NAZWA PRODUKTU

Cx5_tds0386A_Korektor postawy GRAY ROZM.M

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją stosowania.
- Korektor należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Nie zaleca się noszenia korektora przez dłuższy czas bez przerw – zbyt długie użytkowanie może prowadzić do dyskomfortu lub podrażnień skóry.
- Przed założeniem korektora upewnij się, że jest on dobrze dopasowany do ciała – niewłaściwe ustawienie może spowodować brak efektów korekcyjnych.
- Nie używać korektora na gołą skórę, zwłaszcza przez dłuższy czas – zaleca się noszenie na cienką warstwę odzieży (np. koszulkę).
- W przypadku odczuwania bólu, ucisku, trudności z oddychaniem lub jakichkolwiek dolegliwości – należy niezwłocznie przerwać użytkowanie.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Rozpocznij użytkowanie od krótkich sesji – około 20–30 minut dziennie. Stopniowo zwiększaj czas noszenia do maksymalnie 1–2 godzin dziennie.
- ☐ Korektor powinien być noszony regularnie, ale z zachowaniem umiaru – codzienne stosowanie z przerwami daje najlepsze rezultaty.
- ☐ Aby zachować higienę, korektor należy prać ręcznie lub w pralce w temperaturze zalecanej przez producenta, bez użycia silnych detergentów.
- ☐ Korektor można nosić pod ubraniem – jego cienka i elastyczna konstrukcja umożliwia dyskretne użytkowanie w różnych sytuacjach.
- ☐ Nie należy stosować korektora jako jedynej formy korekcji postawy – dla pełnych rezultatów zalecane są także ćwiczenia wzmacniające mięśnie pleców i brzucha.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Produkt nie jest wyrobem medycznym – w przypadku poważnych wad postawy należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.
- Nie stosować w przypadku urazów, stanów zapalnych skóry, świeżych blizn lub otarć w obrębie pleców i ramion.
- Nie używać przez osoby z problemami neurologicznymi, krążeniowymi lub skórnymi bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.
- Produkt przeznaczony jest dla osób o wzroście od 155 cm do 175 cm i wadze nieprzekraczającej 75 kg – użycie przez osoby spoza tego zakresu może skutkować brakiem komfortu lub działania.
- Nie stosować podczas snu ani w czasie intensywnego wysiłku fizycznego.
- Produkt nie powinien być dzielony z innymi użytkownikami ze względu na względy higieniczne.