

NAZWA PRODUKTU

C6_tds0395_Opaska silikonowa nadgarstek - 3x magnes

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używaj opaski magnetycznej na otwarte rany, skaleczenia ani uszkodzoną skórę.
- Przed pierwszym użyciem zaleca się konsultację z lekarzem, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych lub stosowania innych metod leczenia.
- Nie używaj produktu przez osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innymi urządzeniami elektronicznymi w ciele.
- Unikaj kontaktu z substancjami żrącymi, wysokimi temperaturami i otwartym ogniem.
- Produkt przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł pola magnetycznego o dużej mocy.
- Opaski nie należy stosować dłużej niż zalecany przez specjalistę czas bez przerwy.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Zakładaj opaskę na czystą, suchą skórę, dopasowując ją wygodnie do nadgarstka bez nadmiernego ucisku.
- Można ją nosić zarówno na lewej, jak i prawej ręce, w dzień i w nocy – najlepiej z przerwami co kilka godzin.
- Regularne stosowanie może przynieść lepsze efekty w łagodzeniu bólu i wsparciu nadgarstka.
- Po intensywnym wysiłku fizycznym lub w przypadku bólu warto zastosować opaskę na kilka godzin w spoczynku.
- Po każdym użyciu zaleca się przetarcie produktu wilgotną ściereczką i pozostawienie do wyschnięcia.
- Nie zakładaj zbyt ciasno – opaska powinna wspierać, a nie uciskać krążenie.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować u osób z chorobami serca, epilepsją, schorzeniami układu nerwowego oraz kobiet w ciąży bez konsultacji lekarskiej.
- ☐ Nie używać u dzieci oraz osób z zaburzeniami czucia w rękach.
- ☐ Produkt nie zastępuje leczenia farmakologicznego ani fizjoterapii – pełni funkcję wspomagającą.
- ☐ W przypadku pojawienia się dyskomfortu, bólu lub objawów alergicznych, należy natychmiast zaprzestać stosowania.
- ☐ Nie stosować podczas kąpieli, snu w wodzie ani w miejscach o podwyższonej wilgotności.