

NAZWA PRODUKTU

Cx6_tds0392a_Opaska na kolano wiązana XXL ORANGE

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed założeniem stabilizatora upewnij się, że skóra jest sucha i czysta, aby zapobiec podrażnieniom.
- ☐ Nie stosuj stabilizatora na otwarte rany, skaleczenia lub zmiany skórne w okolicy kolana.
- ☐ Unikaj nadmiernego zaciskania opaski, które może powodować ucisk naczyń krwionośnych i ograniczać krążenie.
- ☐ W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia, pieczenia lub nadmiernego obrzęku, natychmiast zdejmij opaskę i skonsultuj się z lekarzem.
- ☐ Nie nosić stabilizatora przez całą dobę bez przerw – zaleca się zdejmowanie na czas odpoczynku.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Zakładaj opaskę na kolano zgodnie z instrukcją, tak aby elastyczne taśmy były dobrze dopasowane, a kompresja regulowana przy pomocy rzepów zapewniała stabilizację bez dyskomfortu.
- ☐ Stabilizator można nosić zarówno na lewe, jak i prawe kolano.
- ☐ Do czyszczenia używaj delikatnego prania ręcznego w temperaturze do 30°C, unikaj suszenia na kaloryferze lub w suszarce bębnowej.
- ☐ Regularnie sprawdzaj stan materiału i rzepów, aby zapewnić skuteczność działania opaski.
- ☐ Stosuj stabilizator podczas aktywności fizycznej lub rehabilitacji, aby zmniejszyć ryzyko urazu i wspomóc regenerację.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować w przypadku ciężkich uszkodzeń kolana wymagających interwencji chirurgicznej bez konsultacji z lekarzem.
- ☐ Osoby z zaburzeniami krążenia, zakrzepicą lub nadwrażliwością skóry powinny skonsultować użycie produktu z lekarzem.
- ☐ Nie używać stabilizatora, jeśli występują objawy alergii na materiały użyte do produkcji (np. podrażnienia, wysypka).
- ☐ Nie stosować podczas snu ani długotrwałego unieruchomienia bez zalecenia lekarza.
- ☐ Produkt nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej i rehabilitacji.