

NAZWA PRODUKTU

C2_tds0702_Masażer Magic

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- ☐ Upewnij się, że skóra w miejscu aplikacji jest czysta, sucha i pozbawiona ran.
- ☐ Nie stosuj urządzenia na mokrym ciele ani w wilgotnym środowisku (np. łazience).
- ☐ Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- ☐ Po zakończeniu sesji wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania.
- ☐ Nie rozbieraj masażera ani nie ingeruj w jego konstrukcję.
- ☐ Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, ogniem oraz skrajnymi temperaturami.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Stosuj urządzenie maksymalnie 1–2 razy dziennie, każdorazowo do 15 minut, zgodnie z ustawieniem automatycznego wyłączenia.
- ☐ Dostosuj tryb i poziom intensywności do własnych preferencji, zaczynając od najniższego poziomu.
- ☐ Nie stosuj urządzenia bezpośrednio po treningu – odczekaj, aż tętno i temperatura ciała się ustabilizują.
- ☐ Podczas ładowania używaj wyłącznie oryginalnego przewodu USB i nadzoruj proces ładowania.
- ☐ Po każdym użyciu oczyść powierzchnię masażera suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- ☐ Wymieniaj plaster, gdy jego przylepność się zmniejszy lub zauważysz ślady zużycia.
- ☐ Przechowuj urządzenie w dołączonym opakowaniu, w miejscu suchym i zacienionym.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosuj urządzenia, jeśli masz rozrusznik serca, implanty elektroniczne lub inne urządzenia medyczne wewnątrz ciała.
- ☐ Nie używaj w przypadku chorób serca, padaczki, nowotworów, cukrzycy, zakrzepicy lub ciężkich zaburzeń neurologicznych.
- ☐ Nie stosuj w czasie ciąży ani w okresie karmienia bez konsultacji z lekarzem.
- ☐ Nie przykładaj elektrod w okolicy głowy, gardła, klatki piersiowej (serca) ani bezpośrednio na kręgosłup.
- ☐ Nie używaj urządzenia na uszkodzoną, podrażnioną, opuchniętą lub infekowaną skórę.
- ☐ Nie korzystaj z masażera w czasie kąpieli, snu, prowadzenia pojazdu ani obsługi maszyn.
- ☐ Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, sensoryczną lub umysłową powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem.
- ☐ W razie wystąpienia bólu, zawrotów głowy, duszności lub innych niepokojących objawów – natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- ☐ Nie stosuj jednocześnie z innymi urządzeniami emitującymi impulsy elektryczne.