

NAZWA PRODUKTU

tds0267_Szyna bruksizm + etui

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed każdym użyciem sprawdź stan szyny. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty lub nosi widoczne ślady zużycia.
- ☐ Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku indywidualnego. Nie udostępniaj go innym osobom.
- ☐ Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami oraz substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał.
- ☐ Szynę należy przechowywać w dołączonym etui, w suchym i czystym miejscu.
- ☐ W przypadku bólu, dyskomfortu lub wystąpienia reakcji alergicznej, natychmiast przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Szyna przeznaczona jest dla osób powyżej 14 roku życia; nie stosować przy zębach mlecznych.
- ☐ Aby dopasować szynę do zębów: zanurz ją na około 5 sekund w gorącej (nie wrzącej) wodzie, ostudź 2–4 sekundy, następnie umieść na łuku zębowym, dociskając językiem i palcami do dopasowania. Po uformowaniu włóż szynę do zimnej wody na co najmniej 2 minuty.
- ☐ W przypadku dyskomfortu lub nadmiaru materiału, nadmiar można odciąć nożykiem lub nożyczkami. Procedurę dopasowania można powtórzyć wielokrotnie.
- ☐ Po każdym użyciu szynę należy dokładnie umyć szczoteczką i pastą do zębów, unikając gorącej wody. Można także stosować środki do czyszczenia protez dentystycznych.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować u dzieci poniżej 14 roku życia.
- ☐ Nie stosować przy zębach mlecznych.
- ☐ Nie stosować w przypadku uszkodzenia produktu lub widocznych śladów zużycia.
- ☐ Osoby z poważnymi problemami stomatologicznymi powinny skonsultować użycie szyny z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania.
- ☐ Produkt nie zastępuje profesjonalnego leczenia stomatologicznego ani terapii bruksizmu.