

NAZWA PRODUKTU

2x NAKŁADKA SZYNA RELAKSACYJNA NA BRUKSIZM ZGRZYTANIE - ROZMIAR S

(tds0749)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego.
- ☐ Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że nakładka nie jest uszkodzona lub pęknięta.
- ☐ Nie stosować u dzieci bez konsultacji z lekarzem lub stomatologiem.
- ☐ Osoby z chorobami dziąseł, zębów lub alergią na materiały użyte w nakładce powinny skonsultować się z dentystą przed użyciem.
- ☐ Nakładka nie powinna być używana podczas jedzenia ani picia gorących napojów.
- ☐ Przechowywać w suchym, czystym etui, z dala od dzieci i zwierząt.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed założeniem nakładki dokładnie umyj ręce.
- ☐ Umieść nakładkę na górnym lub dolnym łuku zębowym zgodnie z instrukcją producenta.
- ☐ Nakładkę należy nosić w czasie snu lub w sytuacjach określonych przez specjalistę.
- ☐ Po każdym użyciu opłucz nakładkę letnią wodą i oczyść miękką szczoteczką bez użycia agresywnych detergentów.
- ☐ Regularnie sprawdzaj stan nakładki – w przypadku pęknięć lub deformacji należy wymienić produkt.
- ☐ Przechowuj w etui zapewniającym higienę i ochronę przed kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować przy silnych chorobach dziąseł, infekcjach jamy ustnej lub w przypadku bólu zębów bez konsultacji stomatologicznej.
- ☐ Nie stosować w okresie aktywnego leczenia stomatologicznego, jeśli lekarz zaleci inaczej.
- ☐ Nie używać nakładki przez osoby uczulone na materiały z tworzywa sztucznego zastosowane w produkcie.
- ☐ Nie pozostawiać nakładki w gorącej wodzie ani w pobliżu źródeł ciepła – może ulec deformacji.
- ☐ Nie używać nakładki w połączeniu z innymi aparatami ortodontycznymi bez konsultacji z ortodontą.