

NAZWA PRODUKTU

B4_tds0597_Zestaw do woskowiny

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed każdym użyciem upewnij się, że urządzenie (strzykawka oraz końcówka silikonowa) jest dokładnie oczyszczone.
- ☐ Do czyszczenia używaj wyłącznie czystej, letniej wody. Unikaj wody z kranu w miejscach o niskiej jakości sanitarnej.
 - ☐ Nie stosuj urządzenia u dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- ☐ Podczas aplikacji wody zachowaj ostrożność, aby nie wprowadzać jej pod zbyt dużym ciśnieniem.
- ☐ Po każdym użyciu dokładnie osusz urządzenie i przechowuj je w suchym, czystym miejscu.
- ☐ Nie udostępniaj końcówki silikonowej innym osobom – dla zachowania higieny każda osoba powinna korzystać z własnej końcówki.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Napełnij strzykawkę letnią, czystą wodą. Nie używaj wody zbyt zimnej ani zbyt gorącej.
- ☐ Delikatnie wprowadź silikonową końcówkę do wejścia kanału usznego, nie wkładając jej zbyt głęboko.
- ☐ Powoli naciskaj tłok strzykawki, wprowadzając wodę pod łagodnym ciśnieniem.
- ☐ Pozwól wodzie wypłynąć swobodnie z ucha – najlepiej wykonywać zabieg nad umywalką lub z użyciem pojemnika.
- ☐ Po zakończeniu zabiegu przemyj strzykawkę i końcówkę wodą, osusz i przechowuj.
- ☐ Zaleca się stosowanie urządzenia nie częściej niż raz na kilka dni, aby nie zaburzyć naturalnej równowagi wewnątrz ucha.

- ☐ Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją i – w przypadku wątpliwości – skonsultuj się z lekarzem.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosuj urządzenia w przypadku uszkodzenia błony bębenkowej, perforacji lub obecności rurki wentylacyjnej w uchu.
- ☐ Nie używaj w przypadku występowania infekcji ucha, bólu, wycieku lub jakichkolwiek stanów zapalnych.
- ☐ Osoby z cukrzycą, zaburzeniami odporności lub skłonnością do stanów zapalnych powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- ☐ Urządzenie nie powinno być używane w przypadku zawrotów głowy, osłabionego słuchu lub podejrzenia ciała obcego w uchu.
- ☐ Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej.
- ☐ Produkt nie jest wyrobem medycznym – stosowanie odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

• .