

NAZWA PRODUKTU

**OPASKA ELASTYCZNA ORTEZA STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO KOLANA - ROZMIAR
L (tds0788)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Produkt przeznaczony do stabilizacji i wsparcia stawu kolanowego podczas codziennej aktywności lub lekkiego wysiłku fizycznego.
- ☐ Przed użyciem upewnić się, że rozmiar opaski jest odpowiednio dobrany – zbyt ciasna może powodować ucisk i zaburzenia krążenia.
- ☐ Nie stosować na uszkodzoną, podrażnioną lub chorobowo zmienioną skórę.
- ☐ W przypadku odczuwania bólu, drętwienia lub mrowienia należy natychmiast zdjąć opaskę.
- ☐ Przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od dzieci

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Zakładać opaskę na czystą i suchą skórę, bezpośrednio na kolano.
- ☐ Upewnić się, że stabilizator dobrze przylega, ale nie ogranicza ruchów ani krążenia krwi.
- ☐ Stosować podczas aktywności fizycznej, pracy lub w czasie rekonwalescencji, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
- ☐ Po zakończeniu użytkowania zdjąć opaskę i pozwolić skórze odpocząć.
- ☐ Prać ręcznie w letniej wodzie z delikatnym detergentem, suszyć na płasko – nie suszyć w suszarce ani na kaloryferze

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować jako zamiennika profesjonalnej opieki medycznej lub leczenia urazów.
- Nie używać przez długi czas bez przerw, jeśli nie zalecił tego lekarz lub fizjoterapeuta.
- Nie stosować w przypadku poważnych urazów kolana, obrzęków lub stanów zapalnych bez konsultacji ze specjalistą.
- Nie używać opaski podczas snu, chyba że zaleci to lekarz.
- W razie wystąpienia reakcji alergicznej na materiał należy zaprzestać użytkowania.