

NAZWA PRODUKTU

**PODKOLANÓWKI PRZECIWŻYLAKOWE UCISKOWE NA ŻYLAKI POŃCZOCHY SKARPETKI
(tds0346)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony do wspomagania krążenia krwi w kończynach dolnych.
- Przed pierwszym użyciem upewnić się, że rozmiar podkolanówek jest prawidłowo dobrany.
- Nie stosować na uszkodzoną, podrażnioną lub chorobowo zmienioną skórę.
- W przypadku uczucia nadmiernego ucisku, bólu, drętwienia lub mrowienia należy natychmiast zdjąć podkolanówki.
- Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Zakładać podkolanówki rano, najlepiej przed wstaniem z łóżka, gdy nogi nie są jeszcze opuchnięte.
- Nosić regularnie zgodnie z indywidualnymi potrzebami lub zaleceniami specjalisty.
- Upewnić się, że materiał jest równomiernie rozłożony na nodze, bez zagnieceń i skręceń.
- Prać ręcznie lub w delikatnym programie w niskiej temperaturze, używając łagodnych detergentów.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła – nie suszyć w suszarce bębnowej.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować w przypadku poważnych zaburzeń krążenia, chorób tętnic lub innych schorzeń bez konsultacji z lekarzem.
- Nie używać podczas snu, jeśli nie zaleci tego lekarz.
- Nie traktować produktu jako zamiennika leczenia medycznego.
- Nie używać w przypadku reakcji alergicznej na materiał wyrobu.
- Nie stosować podkolanówek dłużej niż zalecany czas bez przerw.