

NAZWA PRODUKTU

KLIPS MAGNETYCZNY NA NOS PRZECIW CHRAPANIU - POPRAWIA ODDYCHANIE 15 PAR (tds0834)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania na nosie w celu wspomaganie oddychania.
- Przed użyciem sprawdzić, czy klips nie jest uszkodzony ani odkształcony.
- Trzymać z dala od dzieci i osób niezdolnych do samodzielnego usunięcia klipsa.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie stosować podczas aktywności fizycznej, która może spowodować gwałtowne uderzenia w twarz.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Umieścić klips na nosie zgodnie z instrukcją producenta, tak aby lekko rozszerzał nozdrza.
- Produkt może pomóc w poprawie przepływu powietrza i ograniczeniu chrapania podczas snu.
- Stosować pojedynczo lub w serii zgodnie z potrzebą – jeden klips wystarcza na noc.
- Po użyciu oczyścić klips wodą i przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Produkt można stosować regularnie w celu poprawy komfortu snu i oddychania.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować w przypadku uszkodzeń skóry nosa, podrażnień lub infekcji.
- Nie używać u dzieci poniżej 12 lat bez nadzoru dorosłego.
- Nie używać uszkodzonych lub odkształconych klipsów – ryzyko urazu lub dyskomfortu.
- Produkt nie zastępuje leczenia medycznego problemów z oddychaniem lub bezdechem sennym.
- W przypadku wystąpienia bólu, podrażnienia lub trudności w oddychaniu – natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.