

NAZWA PRODUKTU

**STABILIZATOR ŁOKCIA ORTEZA OPASKA ELASTYCZNA UCISKOWA NA ŁOKIEĆ + PASEK
M/L (tds0848)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony wyłącznie do wspomaganie stabilizacji łokcia i wsparcia stawu podczas codziennych aktywności.
- Przed użyciem sprawdzić stan opaski i paska – nie stosować jeśli elementy są uszkodzone.
- Stosować zgodnie z instrukcją, nie zaciskać zbyt mocno – ryzyko ograniczenia krążenia krwi.
- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnego leczenia poważnych urazów lub złamań.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Założyć stabilizator na łokieć tak, aby zapewniał odpowiednie uciskanie i stabilizację stawu.
- Pasek umożliwia regulację siły ucisku zgodnie z indywidualnym komfortem.
- Produkt można stosować podczas aktywności fizycznej, rehabilitacji lub codziennych zajęć.
- Regularnie kontrolować stan skóry pod opaską – w przypadku podrażnień przerwać użycie.
- Produkt wspiera poprawę komfortu ruchu i zmniejszenie przeciążenia stawu łokciowego.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować u osób z ranami, owrzodzeniami lub silnymi podrażnieniami skóry w miejscu zakładania opaski.
- Nie używać zbyt ciasno – ryzyko ograniczenia przepływu krwi i dyskomfortu.
- Produkt nie zastępuje konsultacji medycznej w przypadku urazów, złamań lub poważnych schorzeń stawu łokciowego.
- Nie stosować stabilizatora w czasie snu bez zaleceń lekarza.
- Nie używać uszkodzonego produktu – ryzyko utraty funkcji stabilizacji i urazu.