

NAZWA PRODUKTU

**ŚCIAĞACZ NA KOLANO OPASKA MAGNETYCZNA KOLANA UNIWERSALNA SILIKONOWA
MEGNESY (tds0856)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony wyłącznie do wspomaganie stabilizacji stawu kolanowego i komfortu ruchu.
- Przed użyciem sprawdzić stan opaski i magnesów – nie stosować jeśli elementy są uszkodzone.
- Nie zaciskać zbyt mocno – nadmierny ucisk może ograniczać krążenie krwi i powodować dyskomfort.
- Produkt nie zastępuje konsultacji lekarskiej w przypadku urazów, złamań lub poważnych schorzeń stawu kolanowego.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ognia i wysokiej temperatury.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Opaskę zakładać wokół kolana tak, aby zapewniała stabilizację i delikatny ucisk.
- Magnesy mogą wspomagać komfort noszenia i łagodzić lekkie napięcie mięśni.
- Produkt można stosować podczas aktywności fizycznej, treningu lub codziennych czynności.
- Regularnie kontrolować stan skóry pod opaską – w przypadku podrażnień przerwać użycie.
- Opaska wspomaga stabilizację stawu, poprawia komfort ruchu i może wspierać proces rehabilitacji.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować u osób z ranami, owrzodzeniami lub silnymi podrażnieniami skóry w miejscu zakładania.
- Nie używać zbyt ciasno – ryzyko ograniczenia przepływu krwi i dyskomfortu.
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia poważnych urazów – w przypadku kontuzji należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować opaski podczas snu bez konsultacji medycznej.
- Nie używać uszkodzonego produktu – ryzyko utraty funkcji stabilizacji i urazu.