

## **NAZWA PRODUKTU**

**OPASKA MAGNETYCZNA NA NADGARSTEK DŁOŃ STABILIZATOR NADGARSTKA 10  
MAGNESÓW (tds0867)**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP  
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade  
City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Produkt przeznaczony do wspomagania stabilizacji nadgarstka i komfortu dłoni.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić stan opaski i magnesów – nie stosować, jeśli elementy są uszkodzone.
- Nie zaciskać zbyt mocno – nadmierny ucisk może ograniczać krążenie krwi.
- Produkt nie zastępuje konsultacji lekarskiej w przypadku urazów, złamań lub poważnych schorzeń nadgarstka.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- Opaskę zakładać na nadgarstek tak, aby zapewniała stabilizację i delikatny ucisk.
- Magnes mogą wspomagać komfort noszenia i łagodzić lekkie napięcie mięśni.
- Produkt można stosować podczas aktywności fizycznej, treningu lub codziennych czynności.
- Regularnie kontrolować stan skóry pod opaską – w przypadku podrażnień przerwać użycie.
- Opaska wspomaga stabilizację nadgarstka, poprawia komfort ruchu i może wspierać proces rehabilitacji.

### **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- Nie stosować u osób z ranami, owrzodzeniami lub silnymi podrażnieniami skóry w miejscu zakładania.
- Nie używać zbyt ciasno – ryzyko ograniczenia przepływu krwi i dyskomfortu.
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia poważnych urazów – w przypadku kontuzji należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować opaski podczas snu bez konsultacji medycznej.
- Nie używać uszkodzonego produktu – ryzyko utraty funkcji stabilizacji i urazu.