

## **NAZWA PRODUKTU**

**2x OSŁONKA SILIKONOWA NA PALCE ODCISKI OTARCIA DO DOCINANIA 2x 10CM - PRO  
(tds0869)**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP  
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade  
City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Produkt przeznaczony do ochrony palców przed otarciami, odciskami i podrażnieniami.
- Przed użyciem należy odpowiednio dociąć osłonkę do wymaganego rozmiaru.
- Stosować wyłącznie na czystą i suchą skórę.
- Nie używać, jeśli osłonka jest uszkodzona lub pęknięta.
- Chronić przed dziećmi i przechowywać w suchym miejscu.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- Dociąć osłonkę do odpowiedniego rozmiaru dopasowanego do palca.
- Delikatnie nasunąć osłonkę na palec w miejscu narażonym na otarcie lub odcisk.
- Produkt można stosować w obuwiu codziennym, sportowym lub roboczym.
- Po użyciu zdjąć osłonkę, umyć w letniej wodzie z delikatnym środkiem myjącym i pozostawić do wyschnięcia.
- Regularnie wymieniać lub docinać osłonkę w celu zachowania higieny i ochrony palców.

### **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- Nie stosować na otwarte rany, sączące się zmiany skórne lub stany zapalne bez konsultacji lekarskiej.
- Osoby z cukrzycą lub problemami z krążeniem powinny skonsultować użycie produktu z lekarzem.
- Nie nakładać zbyt ciasno – nadmierny ucisk może pogorszyć krążenie krwi.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje leczenia specjalistycznego.
- W przypadku podrażnień lub dyskomfortu natychmiast zdjąć osłonkę.