

NAZWA PRODUKTU

**SEPARATORY ŻELOWE PALCÓW STOPY NA NACHODZĄCE SIĘ PALCE REDUKCJA UCISKU
SET (tds0873)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony do korekcji nachodzących na siebie palców stopy oraz zmniejszenia ucisku między palcami.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić stan separatorów – nie stosować, jeśli żel jest uszkodzony.
- Zakładać wyłącznie na czystą i suchą skórę.
- Nie stosować jako jedyny sposób leczenia poważnych deformacji palców – w przypadku dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wysokiej temperatury i ognia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Umieścić separatory pomiędzy palcami, tak aby delikatnie rozdzielały palce i zmniejszały ucisk.
- Produkt można stosować w codziennym obuwiu, podczas chodzenia lub w trakcie odpoczynku.
- Miękki żel zapewnia komfort i redukuje otarcia oraz bolesne uciski.
- Po użyciu zdjąć separatory i umyć w letniej wodzie – wysuszyć przed kolejnym użyciem.
- Regularne stosowanie może wspomagać prawidłowe ułożenie palców i komfort stóp.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na otwarte rany, owrzodzenia lub stany zapalne skóry bez konsultacji lekarskiej.
- Osoby z cukrzycą lub problemami z krążeniem powinny skonsultować użycie produktu z lekarzem.
- Nie używać zbyt ciasno – nadmierny ucisk może pogorszyć krążenie krwi i powodować dyskomfort.
- W przypadku podrażnień, zaczerwienień lub bólu natychmiast zdjąć separatory.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje profesjonalnej terapii ortopedycznej.