

NAZWA PRODUKTU

**PROFESJONALNY SEPARATOR ŻELOWY KLIN NA HALUKSY KOREKTOR KOŚLAWYCH
PALCÓW (tds0874)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony do korekcji koślawych palców i haluksów oraz redukcji nacisku między palcami.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić stan separatora – nie stosować, jeśli żel jest uszkodzony lub pęknięty.
- Zakładać wyłącznie na czystą i suchą skórę.
- Produkt nie zastępuje leczenia medycznego w przypadku zaawansowanych deformacji stóp.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Umieścić separator między palcami, tak aby delikatnie rozdzielał palce i łagodził nacisk na haluks.
- Produkt można stosować w codziennym obuwiu lub podczas odpoczynku w celu zwiększenia komfortu stóp.
- Miękki żel zapewnia ochronę przed otarciami i zmniejsza ból podczas chodzenia.
- Po użyciu zdjąć separator, umyć w letniej wodzie i pozostawić do wyschnięcia.
- Regularne stosowanie może wspomagać prawidłowe ustawienie palców i zmniejszać dyskomfort spowodowany haluksami.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na otwarte rany, owrzodzenia lub stany zapalne skóry.
- Osoby z cukrzycą lub problemami z krążeniem powinny skonsultować użycie produktu z lekarzem.
- Nie używać zbyt ciasno – nadmierny ucisk może pogorszyć krążenie krwi i powodować dyskomfort.
- W przypadku podrażnień, zaczerwienień lub bólu natychmiast zdjąć separator.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje profesjonalnej terapii ortopedycznej.