

NAZWA PRODUKTU

**ŻELOWY KOMPRES NA SZYJĘ KARK OKŁAD ZIMNA I CIEPŁA TEMP WIELOKROTNEGO
UŻYTKU (tds0875)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony do stosowania jako okład zimny lub ciepły na szyję, kark i okolice mięśniowe.
- Przed użyciem sprawdzić, czy kompres nie jest uszkodzony lub przeciekający.
- Nie przykładać bezpośrednio do skóry w przypadku ekstremalnych temperatur – zaleca się owinięcie w cienki ręcznik.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów i źródeł ognia.
- Chronić przed dziećmi i zwierzętami.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- **Okład zimny** – schłodzić kompres w lodówce lub zamrażarce na zalecany czas (zwykle 1–2 godziny).
- **Okład ciepły** – podgrzać w ciepłej wodzie lub mikrofalówce zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieścić kompres na szyi lub karku, stosując cienki ręcznik między skórą a kompresem, aby uniknąć poparzenia lub odmrożenia.
- Czas stosowania: zwykle 10–20 minut, w zależności od potrzeb i tolerancji użytkownika.
- Po użyciu przemyć powierzchnię kompresu wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia przed kolejnym użyciem.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na otwarte rany, skaleczenia, oparzenia lub stany zapalne skóry.
- Nie stosować bezpośrednio na oczy ani twarz.
- Osoby z problemami krążeniowymi, neuropatią lub wrażliwą skórą powinny skonsultować stosowanie z lekarzem.
- Nie używać zbyt gorącego lub zbyt zimnego kompresu bezpośrednio na skórę – ryzyko poparzeń lub odmrożeń.
- Produkt jest przeznaczony do użytku zewnętrznego – nie połykać ani nie używać wewnętrznie.