

NAZWA PRODUKTU

**OPASKA MAGNETYCZNA NA NADGARSTEK DŁOŃ STABILIZATOR NADGARSTKA Z 6
MAGNESAMI (tds0854)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony do tymczasowego wsparcia nadgarstka i poprawy komfortu ruchu.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić stan opaski i magnesów – nie stosować, jeśli są uszkodzone.
- Nie stosować u osób z rozrusznikiem serca lub innymi urządzeniami elektronicznymi w ciele – ryzyko zakłóceń działania.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci, ognia i ekstremalnych temperatur.
- Produkt nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej w przypadku urazów nadgarstka.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Założyć opaskę na nadgarstek, dopasowując jej napięcie tak, aby zapewnić stabilizację, ale nie ograniczać krążenia krwi.
- Magnesesy wspomagają krążenie i mogą łagodzić drobny dyskomfort, ale efekt nie jest natychmiastowy ani gwarantowany.
- Można stosować podczas codziennych czynności lub lekkiego wysiłku fizycznego.
- Regularnie sprawdzać stan magnesów i elastyczność opaski – utrzymanie właściwej stabilizacji zapewnia bezpieczeństwo.
- Produkt jest uniwersalny – pasuje na nadgarstki o różnej wielkości dzięki regulowanemu zapięciu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie używać w przypadku otwartych ran, stanów zapalnych lub poważnych urazów nadgarstka.
- Nie stosować u osób z urządzeniami elektronicznymi w ciele (np. rozrusznik serca) – ryzyko zakłóceń.
- Nie nosić opaski zbyt ciasno – ryzyko zaburzenia krążenia krwi.
- Produkt nie zastępuje leczenia lekarskiego ani fizjoterapii.
- W przypadku bólu, obrzęku lub dyskomfortu przerwać użycie i skonsultować się z lekarzem.