

NAZWA PRODUKTU

**OPASKA MAGNETYCZNA NA NADGARSTEK DŁOŃ STABILIZATOR NADGARSTKA Z 4
MAGNESAMI (tds0890)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony do tymczasowego wsparcia nadgarstka i poprawy komfortu ruchu.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić stan opaski i magnesów – nie używać, jeśli są uszkodzone.
- Nie stosować u osób z rozrusznikiem serca lub innymi implantami elektronicznymi – ryzyko zakłóceń.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci, ognia i ekstremalnych temperatur.
- Produkt nie zastępuje profesjonalnej diagnozy ani leczenia medycznego przy urazach nadgarstka.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Założyć opaskę na nadgarstek, dopasowując jej napięcie – powinna stabilizować nadgarstek, ale nie ograniczać krążenia krwi.
- Magnes mogą wspomagać komfort i lekką ulgę przy drobnym dyskomforcie – efekt może być indywidualny.
- Można stosować podczas codziennych czynności lub lekkiego wysiłku fizycznego.
- Regularnie sprawdzać stan opaski i magnesów – zapewnia to bezpieczeństwo i skuteczność.
- Produkt uniwersalny – regulowany, pasuje na nadgarstki o różnych rozmiarach.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie używać w przypadku otwartych ran, stanów zapalnych lub poważnych urazów nadgarstka.
- Nie stosować u osób z implantami elektronicznymi (rozrusznik serca, pompa insulinowa) – ryzyko zakłóceń.
- Nie nosić opaski zbyt ciasno – ryzyko ograniczenia krążenia.
- Produkt nie zastępuje leczenia lekarskiego ani fizjoterapii.
- W przypadku bólu, obrzęku lub dyskomfortu przerwać użycie i skonsultować się z lekarzem.